

歯科材料 (06) 歯科用印象材料

一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 70891000

ボナインテルデュプリ

*【禁忌・禁止】

本品に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴がある術本品者は、直接本品に触れないようにすること。

【形状・構造及び原理等】

形状・構造



【原理】

インテルデュプリ A とインテルデュプリ B を練和すると、白金触媒の作用で付加反応を起こし、架橋結合することにより弾性が増大する。

【使用目的又は効果】

本品は、複模型の作製に用いる。

【使用方法等】

1. 模型をフラスコのベースに固定する。
2. シリコン用の分離材を吹き付けて、余剰分をエアーで乾燥させる。
3. インテルデュプリ A: インテルデュプリ B を 1:1 の割合で 60 秒間練和し、フラスコに流し込む。
4. 22～25℃ で約 15 分間放置し、本品を硬化させる。
本品が硬化していることを確認してから、模型を取り外す。
5. 印象面に界面活性材を吹き付けて 1 分間乾燥させた後、余剰分をエアーで完全に乾燥させる。
6. フラスコから取り外した印象をバイブレーター上に置き、複模型材を一方向から注入する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品の硬化を妨げる恐れがあるため、下記の物質とは接触させないこと。
 - ・縮合重合型シリコン
 - ・ポリ塩化ビニル安定剤
 - ・油分
 - ・油性のブロックアウト用粘土
 - ・天然ゴム (ラテックス)
- 2) 本品はよく振り混ぜてから使用すること。
- 3) 印象面を界面活性材で処理しないと、気泡が発生する原因となるので注意すること。
- 4) 模型を外す前に、印象材が硬化していることを確認すること。
完全に硬化する前に模型を取り外すと、シリコンが変形する原因となるので注意すること。
- 5) 印象をフラスコから取り外して複模型材を注入すること。

*【使用上の注意】

【使用注意】

1. 本品を他の製品と混用しないこと。
2. キャタリストとベースや同一ロットの組み合わせのみで使用する。また同一の割合で混合すること。

【重要な基本的注意】

1. 本品を使用する際には、必ず医療用手袋及び保護メガネ等を着用し、目、皮膚に付着しないように十分注意すること。
2. 本品が目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
3. 本品が長時間皮膚に触れないようにすること。
皮膚に触れた場合には、石鹼と水で洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けること。
4. 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋等を用いて、直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、直ちに医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

5℃～27℃で保管すること。

【使用期限】

1. ラベル／包装に記載 (製造元データによる自己認証)
 2. 本品は包装に記載の使用期限までに使用し、使用期限切れの本品を使用しないこと。
- (例)  XXXX-YY は、使用期限 XXXX 年 YY 月を示す。)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	エーピーエス株式会社
製造業者	Interdent d.o.o.
国名	スロベニア