

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストینگワックス 16189000

BONAWX モデリングワックス M

【形状・構造及び原理等】

* [種類]

クラウンワックス クイック グレー

[原理]

熱したインスツルメント等を使用し、軟化させ、補綴物の
蠟型を作製するために使用する。

【使用目的又は効果】

ストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製の
キャストینگワックスをいう。

【使用方法等】

- ・模型材の表面にワックス分離材を塗布する。
- ・ワックスインスツルメントなどを用いて、少量ずつ適温に溶かしたワックスを盛上げていく。
- ・カービング・埋没は通法に従い作業する。
- ・サービカルワックスは、蠟型作製時のマージン部分に使用する。
- ・ブロッキングアウトワックスは、アンダーカット、リリーフ部分に使用する。

【使用上の注意】

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・本製品を使用する際には必ず換気しながら使用すること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温保管
- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しないこと。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エービーエス株式会社
製造業者 MORSA Wachswarenfabrik Sallinger GmbH
国名 ドイツ