

歯科材料(09) 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

ボナラバーポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

酸化アルミナ を合成ゴムで結合したポイント、ホイール、ディスク状研磨剤である。

・【種類】 色、粗さ形状



色、粗さ	形状	適用
ブラック 粗	ホイール シリンダー	ノンプレシヤス
ブラウン 粗～中	ホイール シリンダー	ノンプレシヤス チタン
グリーン 細	ホイール シリンダー	ノンプレシヤス プレシヤス チタン

【寸法】

ホイール 直径 22mm 厚さ 3mm
シリンダー 直径 6mm 長さ 23mm

【使用目的又は効果】

- ・ 歯科補綴装置等の研磨に用いる。
(推奨研磨対象) 金合金、銀合金、パラジウム合金、ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金。

【使用方法等】

- ・ ハンドピースに装備し回転させ断続的に被切削物に押し付けて研磨する。
- ・ 研磨面の粗さが3通りあり、状況に応じ使い分ける。
- ・ 最大回転数: 10,000rpm

【使用上の注意】

- ・ ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ・ 使用前に回転させて振れがないことを確認すること。
- ・ 錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ・ 目を保護するために保護めがね等を使用すること。
- ・ 最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・ 本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関が認知した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・ 本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エーピーエス株式会社
製造業者 Shanghai Zogear Industries Co., Ltd.
国名 中華人民共和国