

歯科材料(09) 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

ボナビッグポイント

【形状・構造及び原理等】

形状



ブラウン(粗)

グレー (中粗)

グリーン(細)

- ・切削部(ヘッド) : シリコン、酸化珪素
- ・軸部(シャンク) : ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

- ・シリコンゴムを基材部に混練されたポイントで、レジン床等を研磨するために使用する。

【使用方法等】

- ・ハンドピースに装備し回転させ断続的に被切削物に押し付けて研磨する。
- ・研磨面の粗さが3通りあり、状況に応じ使い分ける。
- ・最大回転数:15,000rpm

【使用上の注意】

- ・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ・使用前に回転させて振れがないことを確認すること。
- ・錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ・目を保護するために保護メガネ等を使用すること。
- ・最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関が認知した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エーピーエス株式会社

製造業者 Shanghai Zogear Industries Co., Ltd.

国名 中華人民共和国