

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器歯科用キャスティングワックス 16189000

サービカルワックス

【形状・構造及び原理等】

- 形状：常温で固形



- 主成分：パラフィンワックス、カルナウバロウ、色素
- 物理的性能

融解点	赤色	59℃
	紫色	64℃

- 原理：熱したインストルメント等を使用し、軟化させ、補綴物の蠟型を作製するために使用する。

【使用目的又は効果】

- ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いる。

【使用方法等】

- 模型材の表面にワックス分離材を塗布する。
- ワックス インストルメントなどを用いて、歯頸部に少量ずつ適温に溶かしたワックスを盛上げていく。
- ワックスアップ、カービング、埋没は通法に従い作業する。

【使用上の注意】

- 本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 使用場所には消火器を備えること。
- 他の製品と混用しないこと。
- 本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- 本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 室温保管
- 本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- 使用及び保管場所には消火器を備えること。
- 本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- 本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エービーエス株式会社

製造業者 Interdent d.o.o.

国名 スロベニア