

機械器具49 医療用穿刺器，穿削器及び穿孔器
一般医療機器歯科用マンドレル 35170000

チップホルダー

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

本品は、ネジ、ワッシャー、軸から成り、ストレートハンドピース（HP）用である。



用途 ポイント状、シリンダー状の研削材を取りつける。

軸の径 2.35mm

最高許容 回転速度 21,000 rpm

〔材質〕

ステンレス

〔原理〕

本品に研削材を取り付け、歯科技工用ハンドピース及びレーズに装着し、回転させ、歯科用補綴物を研削、研磨する。

【使用目的又は効果】

歯科技工用ポイント又はシリンダー状の研削材を取付けるシャフト

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 軸からネジを取り外し、歯科技工用ホイール又はディスク等の研削材を取り付ける。
2. さらに、歯科技工用ハンドピース及びレーズに装着し、回転させ、歯科用補綴物を研削、研磨する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. 歯科技工専用であり、口腔内で使用しないこと。
2. ハンドピースに装着する際は、メーカーの指示に従って、軸を確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
3. 右（時計方向）回転で使用する。
4. 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
5. 破折、変形することがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

1. 取り付けるポイント又はシリンダーの最高許容回転速度を超えて使用しないこと。
2. 本品は歯科技工専用であり、口腔内で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者	エービーエス株式会社
製造業者	Edenta Etablissement
国名	リヒテンシュタイン