

機械器具49 医療用穿刺器，穿削器及び穿孔器
一般医療機器歯科用マンドレル 35170000

マンドレル

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

本品は、ネジ、ワッシャー、軸から成り、ストレートハンドピース（HP）用である。



【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者	エービーエス株式会社
製造業者	Shanghai Zogear Industries Co., Ltd.
国名	中華人民共和国

商品番号	用途	全長 (mm)	軸の径 (mm)	最高許容 回転速度 (rpm)
(段なし)	ラバーホイール又は フェルトホイール用	47.5	2.35	10.000
(段付き)	ラバーホイール又は フェルトホイール用	47.5	2.35	10.000

〔材質〕

ステンレス

〔原理〕

本品に研削材を取り付け、歯科技工用ハンドピース及びレーズに装着し、回転させ、歯科用補綴物を研削、研磨する。

【使用目的又は効果】

歯科技工用ホイール又はディスク等の研削材を取り付けるシャフト

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 軸からネジを取り外し、歯科技工用ホイール又はディスク等の研削材を取り付ける。
2. さらに、歯科技工用ハンドピース及びレーズに装着し、回転させ、歯科用補綴物を研削、研磨する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. 歯科技工専用であり、口腔内で使用しないこと。
2. ハンドピースに装着する際は、メーカーの指示に従って、軸を確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
3. 右（時計方向）回転で使用する。
4. 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
5. 破折、変形することがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

1. 取り付けるホイール又はディスクの最高許容回転速度を超えて 使用しないこと。
2. 本品は歯科技工専用であり、口腔内で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。