

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

スイス製ラバーポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

種類はポイント型とホイール型の 2 種類がある。



グレー(粗)

〔原理〕

歯科技工用マイクロモーターのハンドピースに装着し、回転させて用いることで補綴物を研磨する。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、補綴物を研磨するために使用する。
(推奨研磨対象) 金合金、銀合金、パラジウム合金、ポーセレン、レジン歯、メタルセラミックのマージン部、コバルトクロム、チタンの隣接部、

【使用方法等】

- ・本品を歯科用マンドレルに取付け、歯科技工用マイクロモーターのハンドピースに装着し、回転させて用いる。
- ・最大回転数:20,000rpm

【使用上の注意】

- ・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ・使用前に回転させて振れないことを確認すること。
- ・錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ・目を保護するために保護メガネ等を使用すること。
- ・最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関が認めた防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エーピーエス株式会社
製造業者 Edenta Etablissement
国名 リヒテンシュタイン