

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス 16189000

ボナブロックアウトワックス

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

常温で固形のワックス



[成分]

パラフィンワックス、その他

【使用目的又は効果】

[使用目的]

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう
型作製に用いる。

[効果]

アンダーカット部のブロックアウトに使用する。

【使用方法等】

使用目的に合わせ、適量を取り軟化させ、使用する。

【使用上の注意】

1. 本材は「使用目的、効能又は効果」に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 本材は、許可を持った歯科医療従業員のみに限られ、
歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしない
ように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温となる場所(暖房器具の近く、直射日光のあたる
場所など)に放置しないこと。
2. 使用及び保管場所には、消火器を備えること。
3. 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に
保管しないこと。
4. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・
管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エーピーエス株式会社

製造業者 Interdent d.o.o.

国名 スロベニア