

材料(07) 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス 16189000

## ボナフィット

### 【形状・構造及び原理など】

#### 【種類】

ボナフィット ホワイトアイボリー  
ボナフィット ライトアイボリー  
ボナフィット ホワイトベージュ  
ボナフィット ライトベージュ

#### 【原理】

熱したインスツルメントなどを使用し、軟化させ、補綴物の蠟型を作成する為に使用する。

### 【使用目的又は効果】

ロストワックス法によるろう型を作製するために用いるワックスをいう。

### 【使用方法】

- ・ 模型材の表面にワックス分離材を塗布する
- ・ ワックスインスツルメントなどを用いて、少量ずつ適温に溶かしたワックスを盛り上げていく。
- ・ カービング・埋没は通法に従い作業をする。

### 【使用上の注意】

#### 【重要な基本的注意】

- ① 本品を使用する際、適切な換気がなされている場所で使用すること。
- ② 溶解した本品は高温となるため、使用の際には、火傷をしないよう注意をすること。
- ③ 本品の使用により過敏症状が現れた場合には、使用を中止して医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

25℃以下の室温で、火気のない場所に保存すること。

### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エーピーエス株式会社  
製造業者 Al Dente Dentalprodukte.  
国名 ドイツ