

機械器具(50) 開創又は開孔用器具
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 70948009

ディスポ喉頭鏡

再使用禁止


【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1) 再使用禁止。一患者限りの使用とすること。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

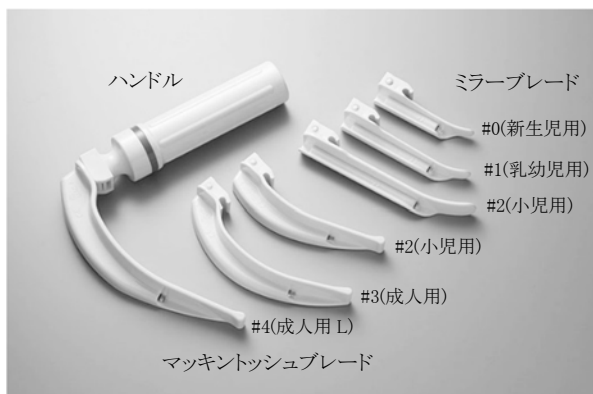

ブレード・ハンドルの接続部は ISO7376 に適合する。

2. 材質

ブレード: ポリカーボネート

3. 原理

患者の口腔内に挿入することで喉頭展開させる。この際、ハンドルに内蔵された光源からブレードが備える光ファイバーを通じてブレード先端方向に光が照射され、喉頭・声帯の視認を補助する。

【使用目的又は効果】

本品は照明装置を内蔵したハンドル、ブレードからなる気道確保のために気管(人の気道)への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具であり、喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。

【使用方法等】

- (1) 使用される患者の体型や症状に適したブレードを選択する。
- (2) ハンドルの上部(グリーンラインより上)を保持したままハンドル下部を回し、上部と下部を分離させる。
- (3) ハンドル下部に単二形乾電池 2 個を、+極を上側にして挿入する。
- (4) ハンドル上部を再び回して取り付ける。
- (5) 選択したブレードをハンドルに取り付ける。このとき、ブレード先端側から光が照射されていることを確認する。
- (6) 使用後はハンドルからブレードを外す。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 本品は使い捨て製品であるため、一度使用したら再使用せず、適切な方法で廃棄すること。
- 2) 本品による挿管が困難な場合は、無理に手技を行わず、本品による挿管を中止すること。
[歯牙、口唇、口頭蓋、口蓋または声帯等を傷つけるおそれがある。]
- 3) 頸椎損傷が疑われる患者に使用する際は、頸椎が動揺しないよう、患者頭部を固定した上で本品を慎重に使用すること。
- 4) 本品のライトはブレードとハンドルを接続することで発光するため、接続時に目に直接光が当たらないよう注意すること。

- 5) ブレードとハンドルの接続時は、がたつきがないよう確実に接続すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 1) 水ぬれに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管する。

<有効期間>

使用期限: 3年[自己認証データによる]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL: 048-853-3661(大代表) FAX: 048-853-0304(代表)

■外国製造所

国名: 台湾

製造業者: Hsiner Co., Ltd. (シーナ社)