

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

DSEチューブ 接続コネクタ付 グレーブス腔鏡用/ディスプレイ サージトロン・デュアル用

再使用禁止

【警告】

- 1) 本品を患者の組織と直接触させないこと。[損傷を与える可能性があるため。]

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止、再滅菌禁止。

<併用医療機器>

- 1) 本品は、専用の排煙装置以外と接続して使用しないこと。
[損傷を起こす可能性があるため。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者


アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

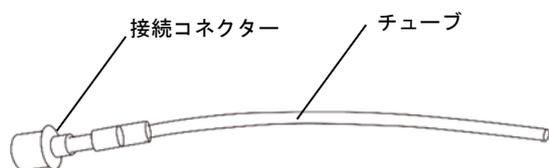

全長:300mm、チューブ径:7.4mm

2. 原理

手術に伴い発生する煙を、吸引器(先端固定部)及び本品を介して排煙装置で吸引する。

【使用目的又は効果】

本品は排煙装置と吸引器(先端固定部)を接続するプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 本品のチューブ先端を腔鏡等の機器の吸引チューブ接続口に接続する。
- 2) 本品の接続コネクタを排煙装置の蛇管と接続する。
- 3) 排煙を開始する。

使用后

- 1) 排煙装置の電源を切る。
- 2) 本品を排煙装置及び接続している機器から外す。
- 3) 本品を廃棄する。

【使用上の注意】

- 1) 本品をふさがないこと。[閉塞あるいは著しく透過性が制限された場合、接続先の排煙装置等が過熱し電源が切れる可能性があるため。]
- 2) 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないように、また、はさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。[破損が生じる可能性があるため。]

【保管方法及び有効期間等】

使用期限:3年(自己認証データによる)

水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。