

機械器具(76) 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式加湿器 35113000

ディスポ加湿器

再使用禁止

【警告】

- 1) 蒸留水が下限ラインを下回らないように、定期的に確認すること。
- 2) 本品の使用前に、酸素供給回路に閉塞等がないか、必ず確認すること。
[重症事故や死亡事故を招くおそれがあるため。]
- 3) 使用中は常に患者の状態を監視し、回路の外れや閉塞等に充分注意すること。
- 4) 接続の合わない機器には使用しないこと。
[酸素漏れを招くおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止。一患者限りの使用とすること。
- 2) 本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。
[爆発や火災の原因となるため。]
- 3) 本品の滅菌は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 原理

コネクターナット部から流入する乾燥したガスを水中に通過させて、ガスに水蒸気を添加する。ガスは、接続口部から患者側へ送気される。

【使用目的又は効果】

本品は、乾燥したガスに水蒸気を添加するために用いる。

【使用方法等】

- 1) ボトルに蒸留水を入れる。このときボトルの上限ラインを超えないこと。
- 2) ボトルにキャップを取り付ける。
- 3) ガス供給源にコネクターナット部を取り付ける。
- 4) キャップの接続口を閉塞させてガスを供給し、加湿器の漏れをテストする。このときリリーフバルブが作動すること。
リリーフバルブが作動しないか、大量の漏れが発生する場合は、加湿器のキャップがボトルにしっかりと取り付けられていること、およびコネクターナット部がガス供給源にしっかりと接続されていることを確認する。
- 5) キャップの接続口に酸素供給チューブ(本品に含まれない)を接続し、すべての接続が確実であることを確認する。
- 6) 適切な流量になるようにガス供給量を調節する。

- 7) リリーフバルブが作動する場合は、送気回路のねじれや閉塞が考えられるので、送気回路を確認して原因を取り除く。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 包装開封後は、すぐに使用すること。
- 2) 過度の力を加えたり、無理な使用をしないこと。
[破損の原因となるため。]
- 3) 接続部および内部を清潔に保つこと。
- 4) 酸素供給チューブを折り曲げたり、ねじったりしないこと。
[破損や閉塞の原因となるため。]
- 5) 使用中は、漏れや外れ等がないことを定期的に確認すること。
- 6) 本品を踏んだり、物を載せたりしないこと。
[回路の閉塞の原因となるため。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管する。

*<有効期間>

使用期限は外箱に記載 [自己認証データによる。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1
TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)