

※ 2011年 12月 12日改訂（第3版）  
 ※ 2010年 02月 18日改訂（第2版）

認証番号 220AABZX00134000

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
 管理医療機器 単回使用自動ランセット 37243002

## 再使用禁止

# ソフトランセット™ III

### 【警告】

#### 使用方法

- ・採血前に穿刺部分を消毒してください。採血後、穿刺部分をおさえ止血してください。[感染の危険性があるため]
- ・刺し傷が治りにくいときは傷口をこまめに消毒してください。[感染の危険性があるため]

### 【禁忌・禁止】


#### 使用方法

- ・再使用禁止。ソフトランセット™ III（本品）は1回限りの使用にしてください。使用後は再使用することなく処分してください。[感染の危険性があるため]
- ・同じ針を他の人に使用したりしないでください。[感染の危険性があるため]
- ・保護キャップが外れている場合には使用しないでください。[無菌状態が保持されていない可能性があるため]

## 【形状・構造及び原理等】

### 1. 構造・構成ユニット

#### (1) 外観図

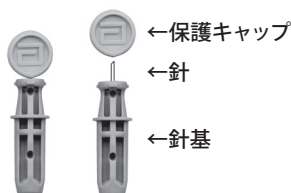

#### (2) 各部の機能

- 保護キャップ：無菌状態を保持しています。  
 針：採血部位を穿刺することにより、微量の血液を採取できます。  
 針基：穿刺器具への装着部分です。

#### (3) 針の寸法・形状

- 外径：28G  
 長さ：3.1±0.45mm  
 針先形状：錐状3面カット

#### (4) 針の材質

ステンレス鋼

## 2. 作動・動作原理

本品を穿刺器具に装着し、穿刺器具のボタンを押すことで装着された本品が自動的に飛び出すことにより、皮膚を穿刺し、少量の血液を採取することができます。保護キャップにより無菌状態が保持されています。

## 【使用目的、効能又は効果】

本品は血液検査のために、指先等の血管から少量の血液を採取するために用いる穿刺針です。

## 【品目仕様等】

| 項目    | 規格値  |
|-------|------|
| 引抜き強さ | 8N以上 |

## 【操作方法又は使用方法等】

### 1. 操作方法

本品は、以下の穿刺器具に装着して使用します。

- ・イージータッチ®

- (1) 本品を穿刺器具に取り付け、保護キャップをねじ切取り去ります。  
ねじ切ったキャップは廃棄の際に使いますので捨てないでください。
- (2) 穿刺器具の操作方法に従って、採血する部位から採血します。手を暖かく保つことや指を軽くマッサージすること、手を腰より低くすることで血液の出方が良くなります。
- (3) 穿刺後、誤って針で刺さないように注意しながら、針にねじ切った保護キャップを被せ、本品を穿刺器具から抜き取ります。



### 2. 使用方法に関連する使用上の注意

- ・穿刺器具への装着は確実に奥まで差し込んでください。

## \*\*\*【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

- ・使用する穿刺器具の添付文書を参照してください。
- ・使用時は、針刺し事故には十分に注意してください。
- ・医師の指示に従ってご使用ください。
- ・血糖測定等のために、穿刺器具を用いて採血する時以外には使用しないでください。
- ・本品に汚損や破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- ・使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ・耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]
- ・指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。

- \*\*・果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
- \*\*・以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
  - ・脱水状態
  - ・ショック状態
  - ・末梢循環障害

## 2. その他の注意

- ・使用後は、医療廃棄物として処理してください。
- ・使用後は、瓶や缶などに入れ、安全に廃棄してください。
- ・感染の危険性を防止するため、本品は1度使用した後に必ず処分してください。

## 3. 貯蔵・保管方法

- ・水濡れに注意し、湿度の高い場所には保管しないでください。
- ・お子さまの手の届かない場所に保管してください。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 有効期間

5年(使用期限は、包装に記載されています。)[自己認証による]

#### 【包装】

25本入り/箱

30本入り/箱

### \*【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者：**アボット ジャパン株式会社**  
〒270-2214  
千葉県松戸市松飛台278  
TEL 047(385)2211(代表)

\*問 合 せ 先：アボット ジャパン株式会社 お客様相談窓口  
TEL 0120-37-8055

製 造 業 者：株式会社旭ポリスライダー

© ABBOTT JAPAN CO., LTD. 2011

