

*2019年12月改訂（第2版）

2017年12月作成（第1版）（新記載要領に基づく作成）

認証番号：229AABZX00120000

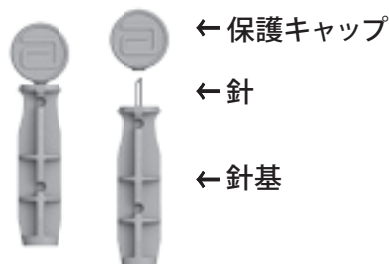
機械器具 49 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器
 管理医療機器 単回使用自動ランセット 37243002

再使用禁止**フリースタイルランセット****【警告】****使用方法**

- ・採血前に穿刺部分を消毒すること。採血後、穿刺部分をおさえ止血すること。[感染の危険性があるため]
- ・刺し傷が治りにくいときは傷口をこまめに消毒すること。[感染の危険性があるため]

【禁忌・禁止】**使用方法**

- ・再使用禁止。[感染の危険性があるため]
- ・同じ針を他の人に使用したりしないこと。[感染の危険性があるため]
- ・保護キャップが外れている場合には使用しないこと。[無菌状態が保持されていない可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】**1. 構成****(1) 外観****(2) 針の寸法**

外径：28G

(3) 針の材質

ステンレス鋼

2. 原理

本品を穿刺器具等に装着し、穿刺器具等のボタンを押すことで装着された本品が自動的に飛び出すことにより、皮膚を穿刺し、少量の血液を採取することができる。本品は、保護キャップにより無菌状態が保持されている単回使用の機器である。

【使用目的】

本品は血液検査のために、指先等の血管から少量の血液を採取するために用いる穿刺針である。

【使用方法等】**1. 操作方法**

- (1) 本品を穿刺器具（自社指定品#）に取り付け、保護キャップをねじ切って取り去る。
ねじ切ったキャップは廃棄の際に使用するため、捨てないこと。
- (2) 穿刺器具（自社指定品#）の操作方法に従って、採血する部位から採血する。手を暖かく保つことや指を軽くマッサージすること、手を腰より低くすることで血液の流出が良くなる。
- (3) 穿刺後、誤って針で刺さないように注意しながら、針にねじ切った保護キャップを被せ、本品を穿刺器具（自社指定品#）から抜き取る。

**2. 使用方法に関連する使用上の注意**

- ・穿刺器具（自社指定品#）への装着は確実に奥まで差し込むこと。

#穿刺器具（自社指定品）：イージータッチ

【使用上の注意】**1. 重要な基本的注意**

- ・使用時は、針刺し事故には十分に注意すること。
- ・耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないこと。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがある。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討すること。]
- ・指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗うこと。
- ・果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがある。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があるため。]
- ・以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがある。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、湿度の高い場所には保管しないこと。

2. 有効期間

5年（使用期限は箱に記載（自己認証による））

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

* 製造販売業者：アボットジャパン合同会社

* 問合わせ先：アボットジャパン合同会社
お客様相談窓口
TEL 0120-37-8055

外国製造業者：ファセット テクノロジーズ
Facet Technologies, LLC
米国

© ABBOTT JAPAN LLC 2019
ART38769-001 Rev. A 11/19

