

2005年9月1日作成（第1版）

2016年4月1日改訂（第2版）

医4 整形用品

医療ガーゼ・ジョナーゼ 13700000

一般医療機器

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

- ・ 綿繊維からなるガーゼをそのまま又は重ねて折り畳んだ布状繊維である。
- ・ 綿 100 % ガーゼ
- ・ 性状：白色でにおいはないか又は僅かで著しい異物を含まない。
- ・ 構造：純綿糸を用い平織りに編み込んだもの。

【使用目的又は効果】

- ・ 処置用・手術用ガーゼ
- ・ 人の皮膚、粘膜、組織、骨又は血液に接触し、創傷面の保護、血液、体液等の吸収
- ・ 薬剤の塗布
- ・ 手術後の縫合部、カテーテル及び留置針等穿刺部の被覆保護

【使用方法等（用法・用量含む）】

- ・ 衛生材料として必要枚数を適宜使用すること。

【使用上の注意】

- ・ 体内に残らないように使用すること。滅菌して使用できますが再滅菌はしないこと。

【原理】

- ・ 綿が血液、体液、浸出液等を毛細管現象により吸収する。

【貯蔵方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光及び火気を避け湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
有効期間：開封後は速やかに使用すること。

【保守・点検に係わる事項】

- ・ 再使用禁止

【包装】

- ・ 当該品の入り数は個装ラベルに記載

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

アポロ衛材株式会社
〒599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪 4391 番地
問い合わせ（お客様相談窓口） ☎ 072-494-3278