

2005年9月1日作成（第1版）

2016年4月1日改訂（新記載要領に基づく）

医4 整形用品

コットンボール・ジョナボール 11028000

一般医療機器

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

- ・ 脱脂綿（綿100%）を平にまたは、ロール状に成型し医療現場で使いやすいように球状に丸めたもの。コットンボールに（綿100%・30番手・3本ヨリ）の糸を付けたものを『紐付きコットンボール・ジョナボール』とする。
- ・ 綿100%脱脂綿
- ・ 性状：白色でにおいはないか又は僅かで著しい異物を含まない。
- ・ 構造：記載しているNo.は脱脂綿の直径寸法を表しています。

【性能、使用目的又は効果】

- ・ 処置用・手術用ガーゼ
- ・ 人の皮膚、粘膜、組織、骨又は血液に接触し、創傷面の保護、血液、体液等の吸収
- ・ 薬剤の塗布

【操作方法又は使用方法（用法・用量含む）】

- ・ 衛生材料として必要数を適宜使用すること。

【使用上の注意】

- ・ 体内に残らないように使用すること。滅菌して使用できますが再滅菌はしないこと。
- ・ 包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がある場合は使用しないこと。

【原理】

- ・ 綿が血液、体液、浸出液等を毛細管現象により吸収する。

【貯蔵方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光及び火気を避け湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
使用期間：開封後は速やかに使用すること。

【保守・点検に係わる事項】

- ・ 再使用禁止

【包装】

- ・ 当該品の入り数は個装ラベルに記載

【製造販売する品目の製造所】

- ・ 尾崎工業株式会社
- ・ 許可番号 27BZ006089

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

アポロ衛材株式会社

〒599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪 4391 番地

問い合わせ（お客様相談窓口） ☎ 072-494-0788 E-mail info-apollo@apolloeizai.co.jp