

2005 年 4 月 1 日作成（第 2 版）

2016 年 4 月 1 日改訂（第 3 版）（新記載要項に基づく改訂）

医 4 整形用品

医用滅菌折ガーゼ・ジョナーゼ 13700000

一般医療機器

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・ 綿繊維からなるガーゼをそのまま又は重ねて折り畳んだ布状繊維で滅菌バッグで包装しエチレンオキサイドガス（EOG）滅菌したものである。
- ・ 綿 100 % ガーゼ
- ・ 性状：白色でにおいはないか又は僅かで著しい異物を含まない。
- ・ 構造：純綿糸を用い平織りに編み込んだもの。

【使用目的又は効果】

- ・ 処置用・手術用ガーゼ
- ・ 人の皮膚、粘膜、組織、骨又は血液に接触し、創傷面の保護、血液、体液等の吸収
- ・ 薬剤の塗布
- ・ 手術後の縫合部、カテーテル及び留置針等穿刺部の被覆保護

【使用方法等（用法・用量含む）】

- ・ 衛生材料として必要枚数を適宜使用すること。

【使用上の注意】

- ・ 体内に残らないように使用すること。
- ・ 包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染のある場合は滅菌品として使用しないこと。
- ・ 開封後は早めに使用すること。

【原理】

- ・ 綿が血液、体液、浸出液等を毛細管現象により吸収する。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光及び火気を避け湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
使用期限は容器または被包に表示【自己認証による】

【保守・点検に係わる事項】

- ・ 再使用禁止

【包装】

- ・ 当該品の入り数は個装ラベルに記載

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

アポロ衛材株式会社

〒599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪 4391 番地

問い合わせ（お客様相談窓口） ☎ 072-494-3278