

医 04 整形用品

医療用不織布・スパンクロスコットンガーゼ 34655000

一般医療機器

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと
- 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

- ・コットン 100 % 素材。強い水流結合のみで固定した繊維をそのまま又は重ねて折り畳んだ布状不織布製品である。
- ・性状：白色でにおいは無いか又は僅かで著しい異物を含まない。

【使用目的又は効果】

- ・処置用
- ・人の皮膚、粘膜、組織、骨又は血液に接触し、創傷面の保護、血液、体液等の吸収
- ・薬剤等の塗布

【使用方法等】

- ・衛生材料として必要枚数を適宜使用すること。
- ・創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は AC 滅菌・EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・体内に残らないよう使用すること。
- ・包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染が見られる場合は使用しないこと。
- ・創傷面には滅菌して使用すること。

【原理】

- ・セルロース繊維が血液、体液、浸出液等を毛細管現象により吸収する。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 開封後は速やかに消費すること。

【保守・点検に係わる事項】

- ・再使用禁止

【包装】

- ・当該品の入り数は個装ラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の指名または名称等】

- ・アポロ衛材株式会社 〒 599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪 4391 番地
お問い合わせ先 TEL 072-494-3278