

2016年4月20日作成（第 1 版）

医療機器届出番号:27B3X00003000015

医 04 整形用品

一般医療機器 X 線造影材入りスポンジ 13705000

タオルガーゼ X 線滅菌済

再使用禁止

滅菌

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】 ●綿繊維からなるガーゼをそのまま又は重ねて折り畳み、その周囲等を糸で縫い合わせた布状製品で、X 線造影糸を1本織り込んである。 ●柄付は、綿 100%の紐を付けた製品です。	【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売業者 アポロ衛材株式会社 〒599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪 4391 番地 TEL 072-494-3234
【使用目的又は効果】 ●出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のために開腹術中の身体内部に用いる器具をいう。	
【使用方法等】 ●本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用する。 ●滅菌袋から開封したものについては、使用したものとみなす。	
【使用上の注意】 ●体内へ留意しないこと、 ●包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。 ●開封後は、早めに使用すること。 ●滅菌後は、再滅菌しないこと。 ●再使用しないこと。	
【保管方法及び有効期間等】 ●直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。有効期限は個装に表示。	