

*2017年11月改訂（第2版 新記載要領に基づく改訂）
2010年3月作成（新様式第1版）

届出番号：13B1X00072001075

機械器具 29 電気手術器
一般医療機器 単回使用電極クリーナー 70654000

再使用禁止

チップクリーナー


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。


【形状・構造及び原理等】

1. 外観及び寸法

表

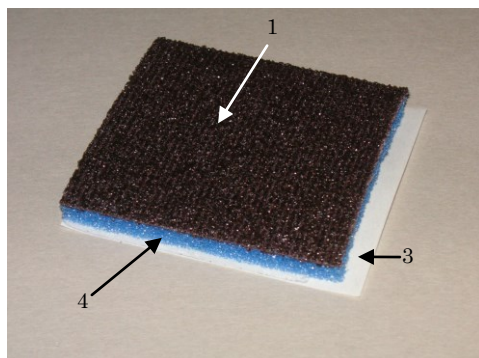

裏

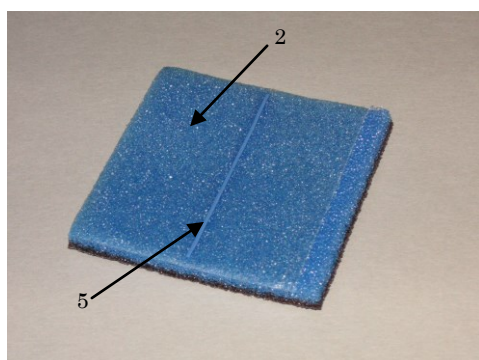

寸法：縦×横（45mm×45mm）

2. 各部の名称及び機能

	名 称	機 能
1	グリット部	アクティブ電極の先端に付着した炭化物等をこすり付けて除去する部分
2	粘着部	使用の際、本品を固定させるための粘着シール
3	シート	粘着部保護のためのシート紙
4	スポンジ	グリット部の支持部
5	X 線不透過性スレッド	X 線にて確認のできる線

3. 原理

電気手術器のアクティブ電極に付着した炭化物等をやすり状のグリット部にこすり付けて除去する。

【使用目的又は効果】

アクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等の除去を目的とした、単回使用のクリーナーである。

【使用方法等】

1. 滅菌包装から取り出す。
2. 裏面のシートをはがし、清潔野の使用しやすい位置に貼り付ける。
3. アクティブ電極の電極先端部をチップクリーナーの表面にこすりつけて先端部に付着した炭化物等を除去する。
4. 使用後は適切な方法で廃棄する。

【使用上の注意】＊

- 重要な基本的注意
 - ・本品の包装に破損がないことを確認してから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
 - ・水のかからない場所に保管すること。
 - ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分など含んだ空気などにより、悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - ・化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

- 使用期限
 - 本品の包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者
 - 株式会社アムコ
 - TEL：03-3265-4261

- 外国製造業者
 - 業者名：アスペンサージカル社（Aspen Surgical Products, Inc.）
 - 国 名：アメリカ合衆国