

機械器具 29 電気手術器  
一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ 70657000

## ERBE 電気手術器用ケーブル

### フットスイッチ用ケーブル

#### 【形状・構造及び原理等】



20189-014 ICC-ICC フットスイッチ用（4ピン/4ピン）



20189-017 ICC350/300-ICC フットスイッチ用（7ピン/4ピン）

#### ●原理

使用する電気手術器からフットスイッチに電源を供給する。

#### 【使用目的又は効果】

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し、制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられるケーブル、スイッチ及びアダプタ等をいう。一次電源に対する延長の用途を除く。

#### 【使用方法等】

本品はエルベ社製電気手術器 ICC シリーズとエルベ社製 ICC 用フットスイッチを接続する専用ケーブルである。

#### ●使用方法

1. 【保守・点検に係る事項】の「使用前点検」を参照し、本品に異常がないことを確認する。
2. 本品をフットスイッチ及び電気手術器に接続する。
3. これ以降の操作は併用する電気手術器、フットスイッチ、電気手術器用アクセサリ等の操作に準じて行う。

#### 【使用上の注意】\*

##### ●重要な基本的注意

- ・ 使用する前に、本品が電気手術器、フットスイッチへの接続が正確でかつ完全であることを確認すること。[不完全な接続により、装置の動作不良となる可能性があるため。]
- ・ 出力に異常を感じた時は、出力設定を変える前に、全ての附属品が正常に動作しているか、及び正しく接続されているかを確認すること。本品を過剰に折り曲げたり、捻ったりしないこと。
- ・ 本品、その他の併用機器及び患者に異常が無いことを常に監視し、異常が認められた際には患者に安全な状態で適切な処置を講ずること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### ●保管方法

- ・ 高温、多湿、直射日光および水濡れを避け、風通しの良い清潔な場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

#### 【保守・点検に係る事項】

##### ●使用前点検

1. プラグやコネクタに破損や亀裂、劣化やその他の変形がないことを確認する。
2. 絶縁被覆に破損、亀裂、破れ、剥がれ、削れ、磨耗（薄くなる）などがないことを確認する。
3. その他、使用上不具合を生じる損傷や変形、異常な凸凹、著しい変形、腐食等がないことを確認する。
4. 電気手術器の電源が OFF であることを確認し、本品を電気手術器に接続する。さらに、本品にフットスイッチを接続し、接続が確実であることを確認する。確認後、電気手術器の電源を ON にする。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### ●製造販売業者

株式会社アムコ  
TEL : 03-3265-4261

##### ●外国製造業者

業者名：エルベ（ERBE Elektromedizin GmbH）  
国名：ドイツ