

機械器具 29 電気手術器  
一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ 70657000

## ERBE アダプタ

### 電極接続用アダプタ

#### 【禁忌・禁止】

- ・本品の絶縁状態を確認してから使用すること。
- ・破損したものを使用しないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

最大許容電圧: 800Vp



20183-051 パイポーラアダプタ (MIS ニードル電極用)

#### ●原理

使用する電気手術器から電気手術器用アクセサリへ電源を供給する。

#### 【使用目的又は効果】

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し、制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられるケーブル、スイッチ及びアダプタ等をいう。  
1次電源に対する延長の用途を除く。

#### 【使用方法等】

本品は、エルベ社製各種パイポーラ針電極とパイポーラケーブルを接続するための変換アダプタである。

接続可能なパイポーラ電極とパイポーラケーブルの例は以下の通りである。

	製品名及びメーカーコード
電極	パイポーラ針電極 (20191-158、20191-188、20191-143等)
ケーブル	パイポーラ鑷子/MIS パイポーラ電極用接続ケーブル (4m)エルベ用 (20196-053) 4mパイポーラケーブル欧州仕様 (20196-045) 等

#### ●使用方法

- ①本品に洗浄・消毒を施す。
- ②本品の絶縁状態を確認する。
- ③本品を使用するパイポーラ針電極及びケーブルにしっかりと差し込み接続する。
- ④これ以降の操作は、併用する電気手術器と電気手術器用アクセサリの操作に準じて行う。

#### 【使用上の注意】\*

##### ●重要な基本的注意

- ・本品を投げたり、落としたりしないよう注意して取り扱うこと。[破損するおそれがあるため。]

- ・過剰な力で引き抜かないこと。[横方向の力を加えるとソケットが破損するおそれがあるため。]
- ・使用中は、本品に触れたり、本品を患者の上に置いたりしないこと。
- ・滅菌しないこと。
- ・本品、その他の併用機器及び患者に異常がないことを絶えず監視し、異常が認められた際には患者に安全な状態で適切な処置を講ずること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### ●保管方法

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分及び硫黄などを含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。
- ・化学品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

#### 【保守・点検に係る事項】

##### ●洗浄・消毒

- ・汚れを落とす際は、湿らせたガーゼや柔らかいブラシを用い、鋭利なものを使用しないこと。[傷つくと、安全性及び性能が著しく損なわれ、本品の劣化が早まるため。]
- ・洗浄液・消毒液の製造元の指示に従い使用すること。
- ・用手洗浄・消毒を推奨する。

##### ●始業前点検

- ・アダプタに破損や亀裂、劣化がないことを確認する。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### ●製造販売業者

株式会社アムコ  
TEL: 03-3265-4261

##### ●外国製造業者

業者名: エルベ (ERBE ELEKTROMEDIZIN GmbH)  
国名: ドイツ