

ディスポーザブル リトリバーブル フォーセプス

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 本品及び本品の包装に破損、汚損等が見られた場合は使用しないこと。
- 再使用禁止。

- 本品を内視鏡に挿入する際は、スライダーを動かさないように保持すること。
- 本品は内視鏡からできるだけ垂直に伸ばすこと。[内視鏡より突出した部分に横向きの力が加わると、本品が破損する恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

●形状

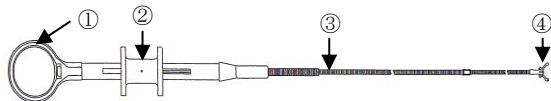

メーカーコード	長さ(カテーター径×有効長 ジョウ長)
7208	2.4mm×230cm ジョウ:5.0mm

①：ハンドル ②：スライダー ③：カテーター ④：先端部

●原材料

カテーター：ポリテトラフルオロエチレン、ステンレススチール
先端部：ステンレススチール

●原理

スライダーを前方にスライドさせると先端部が開き、後方へスライドさせると先端部が閉じる。対象の異物、結石又は切除された組織を先端部内に捕捉することにより、把持し、回収する。

【使用目的又は効果】

内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用する器具で、組織又は異物の把持に用いる。本品は再使用禁止である。

【使用方法等】

1. 本品の包装に破損、汚損等がないことを確認し、包装から取り出す。異常が認められたものは使用しないこと。
2. 本品に破損、亀裂等がないことを確認する。異常が認められたものは使用しないこと。
3. スライダーを動かし、先端部が適切に開閉することを確認する。
4. 目的物の位置を内視鏡で確認した後、先端部が閉じた状態で、ゆっくりと内視鏡の鉗子口に挿入する。内視鏡に鉗子エレベータが付属している場合、エレベータを一番上まで上げてから本品を挿入し、エレベータの動きに合わせて押し込むこと。
5. 目的物の位置でスライダーを動かし、目的物を把持する。
6. 目的物を把持した状態で、本品を内視鏡と共にゆっくりと取り出す。
7. 使用後は適切な処理をして廃棄する。

【使用上の注意】＊

●重要な基本的注意

- 本品は取扱いに注意し、落としたり、ぶつけたり、重いものをのせたり、過大な力を加えないこと。
- 本品を内視鏡に挿入する際は、先端部が閉じた状態で行うこと。
- 内視鏡の視野が確保されていない状態で、本品を内視鏡に挿入しないこと。
- 急激にスライダーを押さないこと。
- 無理な力で先端部を対象組織に押し付けけないこと。
- 先端部が内視鏡から突出している状態で、急激な内視鏡のアングル操作をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

●保管方法

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分等を含んだ空気等により、悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 滅菌パックに破れ、シール部のはがれ、水濡れが発生する恐れのある場所に保管しないこと。
- 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等安全状態に注意すること。
- 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

●使用期間

本品の包装に記載されている。使用前に確認し、使用期限の過ぎたものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

●製造販売業者

株式会社アムコ
TEL：03-3265-4261

●外国製造業者

業者名：テレメッド社（TeleMed Systems, Inc）
国 名：アメリカ合衆国