

機械器具 29 電気手術器
一般医療機器 単回使用電極クリーナー 70654000

再使用禁止


チップクリーナー（無滅菌）

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 外観及び寸法

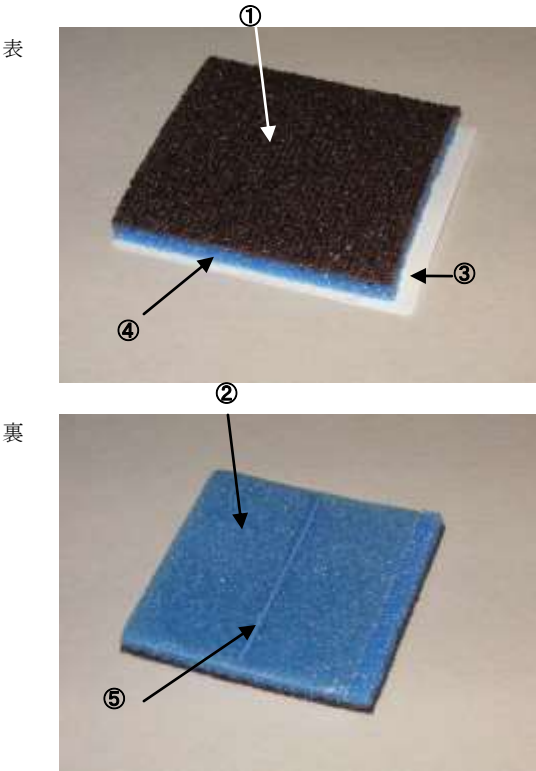

寸法：縦×横（45mm×45mm）

2. 各部の名称及び機能

	名 称	機 能
1	グリット部	アクティブ電極の先端に付着した炭化物等をこすり付けて除去する部分
2	粘着部	使用の際、本品を固定させるための粘着シール
3	シート	粘着部保護のためのシート紙
4	スポンジ	グリット部の支持部
5	X 線不透過性スレッド	X 線にて確認のできる線

3. 原理

電気手術器のアクティブ電極に付着した炭化物等をやすり状のグリット部にこすり付けて除去する。

【使用目的又は効果】

アクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等の除去を目的とした、単回使用のクリーナー。

【使用方法等】

●使用方法

1. 滅菌をする。
2. 裏面のシートをはがし、滅菌野の使用しやすい位置に貼り付ける。
3. アクティブ電極をチップクリーナーの表面にこすりつけて電極に付着した炭化物等を除去する。

●推奨滅菌方法及び推奨滅菌条件

エチレンオキサイドガス滅菌

条件：EO ガス濃度 560mg/L

滅菌時間 6 時間

温度 61±2.8℃

エアレーション 24 時間 49±5.5℃

【保管方法及び有効期間等】

●保管方法

- ・ 水のかからない場所に保管すること。
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分など含んだ空気などにより、悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

●製造販売業者

株式会社 アムコ

TEL：03-3265-4261

●外国製造業者

業者名：アスペン サージカル プロダクツ（Aspen Surgical Products Inc.）

国 名：アメリカ合衆国