

類別：機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器(クラスI) 一般的名称：家庭用貼付型接触粒(JMDNコード：71026000)
販売名：丸山式コイル ブラックアイ

【警告】

1.小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管すること。

【誤飲防止】


2.誤飲を防ぐために小児に使用しないこと。【誤飲防止】

3.本品の使用目的以外に使用しないこと。【目的外使用禁止】

【形状・構造及び原理等】



本体

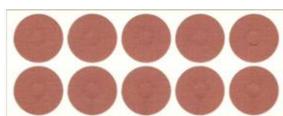

貼付用シール

1. 形状

- ・本体直径：13mm±10% ・本体厚み：2.9mm±10%
- ・貼付用シール

2. 接触部の材質

- ・本体外観（接触部）：スチレン系熱可塑性エラストマーセラミック炭
- ・貼付用シール：テープ部／パルプ・ポリエステル不織布粘着部／アクリル系粘着剤


3. 原理

- ・突起部による圧迫でコリを緩解する。

【使用目的又は効果】

貼付用シールによって、本品の突起している面を身体のコリの部分に貼付することで圧迫し、「コリの緩解」を目的とする。
本品は家庭において使用する。

【使用方法等】

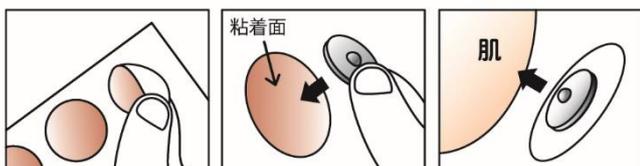

- 1.貼付用シールをはがし本体フラット部分をセットします。
- 2.コリを感じる部分に本体突起部分をあて、貼付用シールで固定します。
- 3.使用期間の目安は1～2日です。本品は繰り返し使用できます。
- 4.使用後は身体より取り外して下さい。

【使用上の注意】

1.医師の治療を受けている人や下記の人は医師と相談のうえご使用ください。

- ①心臓に障害のある人
- ②妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- ③糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人。
- ④皮膚に感染症及び又は創傷のある人。
- ⑤体温38℃以上（有熱期）の人。

例1.急性炎症症状[倦怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
例2.衰弱しているとき。

- ⑥捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人。

2.使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。

3.使用する前には、次のことに注意してください。

- ①本体に割れなどがないかを点検し、割れなどがある場合は使用しないでください。
- ②本体から銅線が出ている場合は使用しないでください。

4.使用中には、次のことに注意してください。

- ①身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- ②装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止してください。
- ③他の治療器と同時に使用しないでください。
- ④貼付用シールの粘着性が弱くなった場合は、新しい貼付用シールと交換してください。

5.使用後及び保管には、次のことにご注意ください。

- ・本品を廃棄する時には、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

【取扱い上の注意】

- ・機器は改造しないでください。

【保守・点検に係る事項】

- ・常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止してください。

【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：愛知電子工業株式会社
製造業者：株式会社ユニカ 仙台第二事務所
住 所：宮城県仙台市太白区あすと長町 4-2-58
電 話：022-304-1162

【総販売元】

総販売元：株式会社ユニカ
住 所：宮城県仙台市太白区あすと長町 4-2-10
電 話：022-304-1162