

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用自動ランセット JMDNコード 37243002

再使用禁止

ピンキーセーフティランセット

【警告】

1. 採血部位に病原微生物が付着し感染の危険性があるため、採血部位を必ず消毒してください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
2. 使用後のホルダーには血液が付着しています。病原微生物による感染を防ぐために、使用後は他人に触れないように廃棄してください。
3. 保護キャップをねじ切って取り外した状態で放置しないでください。[針が誤って発射される危険性があります。]


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。使用後は必ず廃棄してください。[感染の危険性があります。]
2. 使用時にすでに保護キャップが外れていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。[感染の危険性があります。]

【形状・構造及び原理等】

材質

針	: ステンレス鋼
穿刺ボタン	: ポリアセタール
保護キャップ	: ポリエチレン
ホルダー	: ポリエチレン

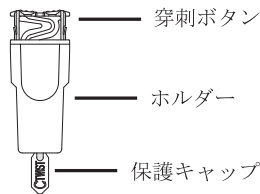


【使用目的又は効果】


本品は血糖値測定等のための微量採血を目的とします。放射線滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【使用方法等】


1. 保護キャップをねじ切ってください。

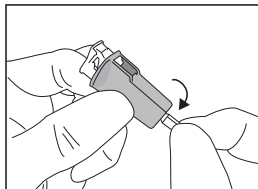


2. 保護キャップをねじ切った後、引っ張って、保護キャップを取り外してください。

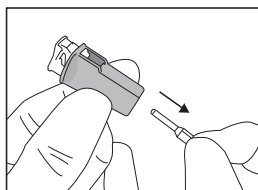


3. 採血部位を消毒し、乾燥させてください。

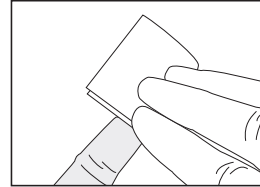

4. 本品を人差し指と中指ではさんで持ち、ホルダーを採血部位に押し当ててください。本品を動かさないようにして、親指で穿刺ボタンを押すと針が出ます。穿刺後、穿刺ボタンはホルダーに押し込まれます。

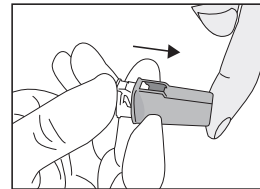

5. 採血部位より血液を採取してください。

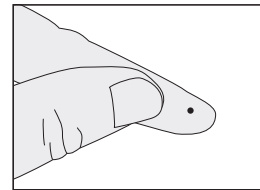

6. 使用後は本品をそのまま廃棄専用容器に入れ、安全に廃棄してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
2. 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
3. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
4. 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]

＜その他の注意＞

1. 保護キャップを取り外したらすぐに使用してください。
2. 穿刺時にホルダーが採血部位から離れると、必要な採血量が得られない場合があります。採血時は「パチン」と音がするまでホルダーを採血部位から離さないでください。
3. 一度作動させると二度と作動しないので、穿刺時以外は作動させないでください。
4. 35℃以上の高温下で保管された場合は、十分な穿刺深さで穿刺ができず、必要な採血量が得られない可能性があります。

