

再使用禁止

アキュチェックピコ

【警告】

- 採血部位に病原微生物が付着し感染の危険性があるため、採血部位を消毒してください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。
傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
- 使用後の本品には血液が付着しています。病原微生物による感染を防ぐために、使用後は他人に触れないように廃棄してください。
- 本品の保護キャップを取り外した状態で放置しないでください。
[誤って穿刺される危険性があります。]


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。一度使用した本品は必ず廃棄してください。[感染の危険性があります。]
- 使用時に採血器具の保護キャップが外れていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。[無菌性の保証ができない場合があります。]

【形状・構造及び原理等】

材質

| | |
|--------|---------|
| 針 | ：ステンレス鋼 |
| 保護キャップ | ：ポリエチレン |
| ホルダー | ：ポリスチレン |

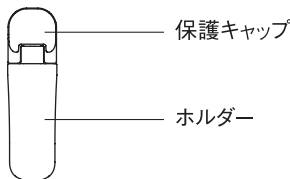

| 保護キャップの色 | 針の深さ | 針の太さ |
|----------|-------|------|
| ピンク | 0.7mm | 30G |
| ゼニスブルー | 1.4mm | 30G |

【使用目的又は効果】

本品は血糖値測定等のための微量採血を目的とします。放射線滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【使用方法等】

- 穿刺前に必ず流水で手をよく洗い、じゅうぶんに乾かしてください。
- ホルダーをしっかり保持し、保護キャップをねじ切り、引っ張って取り外してください。取り外した保護キャップはすぐに廃棄してください。
- 本品の先端を穿刺部位に押し当て、「カチッ」という音がするまで押し付けてください。
- 穿刺した後は、穿刺した部位の周りを軽く押し、血液を必要量出します。
- 使用後は本品をそのまま廃棄専用容器に入れ、安全に廃棄してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
- 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
- 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
- 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]

<その他の注意>

- 採血器具の保護キャップを取り外したらすぐに使用してください。
- 採血器具は、一度作動させると二度と作動しないので、採血時以外は作動させないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- 使用期間
箱に記載しています。[自己認証(当社データ)による]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
株式会社 旭ポリスライダー
〒719-3226 岡山県真庭市三崎860-2
TEL 0867-42-1171

*販売元

ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社
フリーダイヤル：0120-642-860