

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用自動ランセット JMDN コード 37243002

再使用禁止

グルコアシストランセット

【警告】

1. 使用後のホルダーには血液が付着している可能性があります。使用後は速やかに廃棄してください。[感染の危険性があります。]
2. 感染の危険性があるため、採血部位の消毒を必ず行ってください。また採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
3. 保護キャップを取り外した状態で放置しないでください。[針が誤って発射される危険性があります。]
4. 指先以外からの採血により測定を行うことが可能ですが、血糖値が急激に変動する可能性があるときは、指先からの採血をしてください。[低血糖の症状があるときや運動の後など、急激な血糖変動が認められるとき、血糖変動は指先より遅れるとの報告があります。]


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。使用後は必ず廃棄してください。[感染の危険性があります。]
2. 使用時にすでに保護キャップが外れていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。[無菌性の保証ができない場合があります。]

【形状・構造及び原理等】

材質

- | | |
|--------|-----------|
| 針 | : ステンレス鋼 |
| 穿刺ボタン | : ポリアセタール |
| 保護キャップ | : ポリエチレン |
| ホルダー | : ポリエチレン |

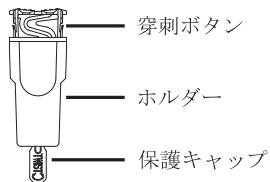


【使用目的又は効果】


本品は血糖値測定等のための微量採血を目的とします。放射線滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【使用方法等】


1. 保護キャップをねじ切ってください。

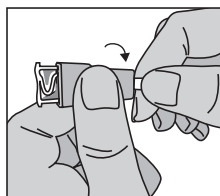


2. 保護キャップをねじ切った後、引っ張って、保護キャップを取り外してください。

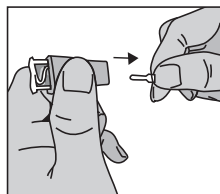


3. 採血部位を消毒し、乾燥させてください。

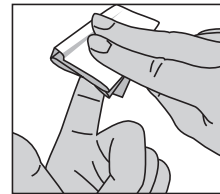

4. 本品を人差し指と中指ではさんで持ち、ホルダーを採血部位に押し当ててください。本品を動かさないようにして、親指で穿刺ボタンを押すと針が出ます。穿刺ボタンは、途中で止めることなく、最後まで一気に押してください。穿刺後、穿刺ボタンはホルダーに押し込まれます。

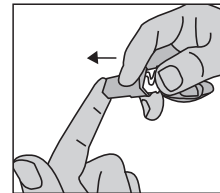

5. 採血部位より血液を採取してください。

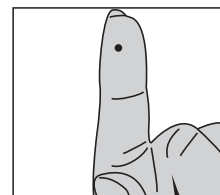

6. 使用後は本品をそのまま廃棄専用容器に入れ、安全に廃棄してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
2. 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
3. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
4. 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]

<その他の注意>

1. 保護キャップを取り外したらすぐに使用してください。
2. 穿刺時にホルダーが採血部位から離れると、必要な採血量が得られない場合があります。採血時は「パチン」と音がするまでホルダーを採血部位から離さないでください。
3. 一度作動させると二度と作動しないので、穿刺時以外は作動させないでください。

4. 穿刺ボタンを押し込み途中の状態で保持された場合は、十分な穿刺深さで穿刺ができず、必要な採血量が得られない可能性があります。
5. 35℃以上の高温下で保管された場合は、十分な穿刺深さで穿刺ができず、必要な採血量が得られない可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿（35℃以上）を避けて保管してください。
2. 使用期間
箱に記載しています。[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 **株式会社 旭ボリスライダー**
〒719-3226 岡山県真庭市三崎 860-2
TEL 0867-42-1171

販 売 元 **大衛株式会社**
〒534-0021 大阪市都島区都島本通 2-2-16

問い合わせ先 **大衛株式会社**
【お客様相談窓口】 TEL. 06-6921-7373
（土、日、祝日を除く 9:00～17:00 まで）