



Teleflex®

** 2019 年 5 月改訂 (第 4 版)

承認番号: 226AFBZX00091000

* 2016 年 7 月改訂 (第 3 版)

機械器具 06 呼吸補助器

管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ (34838012)

HUDSON RCI コネクタ

(T ピース、エルボー、ストレートコネクタ、Y ピース、ワンウェイバルブ、バック付コネクタ、酸素アダプタ)

再使用禁止

【警告】

* 本品を他の器具に接続した後、本品を含むすべての構成部品の接続部が正しく確実に接続され、閉塞やリーク等が生じていないことを確認すること。[偶発的に接続が外れ、換気不全に陥る可能性があるため。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止、再滅菌禁止
- * 2. 酸素を使用している場合、火気厳禁とすること。[爆発や火災のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

< 形状、構造等 >

本品は呼吸回路と気管内チューブ、フェースマスク、ネブライザ、他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために用いるプラスチック製器具である。

** < 各部の名称 >

1. T ピース

品番	形状	接続部
1077		両端: 22M ネブライザコネクタ: 15F/22M
1639		両端: 22M (図左側) 22F (図右側) ネブライザコネクタ: 18F

2. エルボー

品番	形状	接続部
1641		22F (図下側) 22M (図上側)

3. ストレートコネクタ

品番	形状	接続部
1421		両端: 22F

1422		両端: 15F/22M
1409		両端: 22M
1645		22F (図左側) 22M (図右側) 温度モニタポート付き
380-74		22F (図左側) 22M (図右側) 温度モニタポート付き

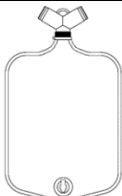
4. Y ピース

品番	形状	接続部
1660		機械側: 22M 患者側: 15F/22M 気道内圧モニタポート付き 温度モニタポート付き
1661		機械側: 22M 患者側: 15F/22M 温度モニタポート付き
1662		機械側: 22M 患者側: 15F/22M

5. ワンウェイバルブ

品番	形状	接続部
1665		ガスフロー上流側: 22F ガスフロー下流側: 22M

6. バッグ付コネクタ

品番	形状	接続部
1742		22MのYピースコネクタ付き バッグ容量: 750mL

7. 酸素アダプタ

品番	形状	概要
42555		サブライチューブをガス供給源へ接続
384-00		サブライチューブをガス供給源へ接続
1420		2本のサブライチューブを連結
1423		サブライチューブをガス供給源へ接続

<原理>

Tピース、エルボー、ストレートコネクタ、Yピース:

患者の麻酔管理又は呼吸管理において呼吸回路と気管内チューブ、フェースマスク、ネブライザ他の呼吸回路のコンポーネントを接続する。

ワンウェイバルブ

ガスフローを矢印の向きに制限する。

バック付コネクタ

バッグに呼吸管内の結露等を貯めることができる。

酸素アダプタ

酸素アダプタはサブライチューブをガス供給源へ接続する。

<材質>

バッグ付きコネクタのバッグ: ポリ塩化ビニル※

※ポリ塩化ビニルの可塑剤にはフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)を使用。

【使用目的又は効果】

呼吸回路と気管内チューブ、フェースマスク、ネブライザ、他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために用いる。

【使用方法等】

Tピース、エルボー、ストレートコネクタ、Yピース

1. 接続に適したサイズを選択する。
2. それぞれのコネクタに、呼吸管等を接続する。
気道内圧モニタポートや吸引用ポートを使用しないときはキャップを閉じておくこと。

ワンウェイバルブ

1. 接続に適したサイズを選択する。
2. 矢印をガスフローの向きに合わせ、コネクタに呼吸管等を接続する。

バック付コネクタ

1. 接続に適したサイズを選択する。
2. それぞれのコネクタに、呼吸管等を接続する。
3. バッグ内の液を適宜廃棄する。

酸素アダプタ

1. サブライチューブアダプタをガス供給源へ接続する。必要に応じて、サブライチューブ連結アダプタでサブライチューブを連結して延長する。
2. サブライチューブを本品にしっかりと接続する。

【使用上の注意】

*1. 重要な基本的注意

- (1) 本品(バッグ付コネクタ)は、可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがある。
- (2) 本品をフェノールやエーテルなどの有機溶媒及びホルマリン剤で消毒しないこと。[製品の変形及び破損のおそれがある。]

*2. 不具合・有害事象

- (1) 重大な不具合
 - 1) 回路接続部の緩み・外れ
 - 2) 閉塞・リーク
 - 3) 破損

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:

水濡れ、高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

テレフレックスメディカルジャパン株式会社

カスタマーサービス Tel: 0570-055-160

製造業者

テレフレックスメディカル(米国)

Teleflex Medical

Teleflex®