

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 (JMDN 70901000)

コンパウンド

【形状・構造及び原理等】*

組成：中性 または 弱アルカリ性洗浄液
外観：■AC-D eco・・・淡黄色透明の液体
■AC-M・・・淡黄色透明の液体
■AC-F・・・黄色粉末
■AC-D・・・淡黄色透明の液体
■AC-K・・・淡黄色透明の液体
■AC-X・・・淡黄色透明の液体

成分：脂肪酸アルカノールアミド
イソプロピルアルコール
(AC-D eco、AC-M、AC-X、AC-Dに含有)
ジェタノールアミン (AC-Kに含有)
水

【使用目的又は効果】

(1) 使用目的、用途
バレル研磨機（自動研磨機）用として、歯科用合金、歯科用貴金属および歯科用樹脂の表面処理・洗浄に用いる。

【使用方法等】

バレル研磨機（自動研磨機）に本品と被加工物、バレル研磨石、水を投入する。
本品の投入量は水量に対し1～3%希釈を目安とする。
必ず使用するバレル研磨機（自動研磨機）の操作手順に従うこと。

【使用上の注意】*

- バレル研磨機（自動研磨機）使用時には必ず本品を投入すること。
- 必ず湿式研磨にて水と一緒に使用すること。
- 本品の投入量は水量に対し1～3%希釈を目安とすること。
投入量が多すぎても少なすぎても、研磨洗浄能力を大きく損なう恐れがある。
- 研磨終了後、研磨機の研磨槽が高温の場合は研磨槽が冷えてから開閉作業を行なうこと。特に長時間連続運転を行なった場合、摩擦熱により研磨槽が熱膨張して内部が高温高圧になり研磨槽の開閉時に内容物が発散する可能性がある。
- 研磨終了後、使用した水・コンパウンドは汚れているので、次の研磨機使用時までには廃棄すること。
- 本品が床などにこぼれた場合は滑りやすいので大変危険である。速やかに清掃すること。
- 本品は記載の用途以外には使用しないこと。
- 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。
- 取り扱いの際には保護手袋／保護眼鏡／保護面／呼吸用保護具を着用すること。
- 使用後は国際／国／都道府県／市町村の規則に従い、廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

(1) 貯蔵・保管方法
容器から漏れ・飛散が無きよう口部をしっかりと閉じ転倒・落下しないようにすること。
直射日光を避けて湿気の無い場所で保管すること。

【包装】*

品番	内容量					
	800g	5kg	20kg	1L	4L	18L
AC-D eco				○	○	○
AC-M				○	○	○
AC-F	○	○	○			
AC-D				○	○	○
AC-K						○
AC-X						○

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者・製造業者
氏名：有限会社 秋山産業
住所：〒572-0865
大阪府寝屋川市小路北町7番29号
電話番号：072-822-6936