

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具（JMDN 70901000）

デンチャーパッド

【形状・構造及び原理等】

組成：繊維（不織布）、接着剤、砥粒の混合物
外観：ホイール形

種類	外観色
ハード	茶色
ソフト	赤茶色

成分：ポリアミドナイロン繊維
硬化済み接着剤（SBR 樹脂、NBR 樹脂等）
酸化アルミニウム
石灰石

【使用目的又は効果】

- (1) 使用目的
歯科技工物制作過程において、レジン、ポリカ
ーボネイト樹脂等の表面研磨に用いる

【使用方法等】

研削機械（ハンドピースグラインダー）にて任意
の回転数で回転させた被加工物表面に接触させる。
研削機械への取付には研磨ホイール用マンドレル
を使用すること。
使用の際には必ず研削機械の操作手順に従うこと。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- (1) 取付前に外観検査を行うこと。変形、割れ、
欠け等がある場合は使用禁止。
- (2) マンドレルには接触幅が左右等しく且つ適正
な外径を持つフランジが備わったものを使用
すること。
（フランジの外径は本品外径の 1/3 以上のも
のを使用すること）
また、変形、傷、汚れ、錆のあるマンドレル
（フランジ）は使用しないこと。
- (3) 本品を取り付ける前に研磨機械の回転方向を
確認すること。
- (4) ホイールの穴径が機械に適合しない場合、無
理に押し込んだり、穴径の改修を行わないこ
と。
- (5) 作業開始前に 1 分以上、本品を取り替えた際
は 3 分間以上の試運転を行うこと。
- (6) 被包に表記されている最高回転数を超えての
使用は絶対に行わないこと。
- (7) 研削作業の際には粉塵が発生する。
粉塵による人体への影響を避けるため、防塵
マスク、手袋等の適切な防塵設備の使用と集
塵装置の設置を義務付けること。また、眼の
損傷を防ぐため、保護めがねを着用すること。
- (8) 本品回転中は手、足、指等が触れない様に注
意すること。また、回転が完全に止まらない
うちにハンドピースグラインダーを台や加工
物等に接触させない様注意すること。
- (9) 本品の側面を使用したり、加工物に無理に押
し付けたりしないこと。

【使用上の注意】

- (1) 使用上の注意
- 1) 本品は記載の用途以外には使用しないこと。
- 2) 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。
- 3) 使用後は消防法、産業廃棄物処理法に従って
処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 保管方法
直射日光を避けて湿気のない場所で保管するこ
と。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：有限会社 秋山産業
住所：〒572-0865
大阪府寝屋川市小路北町 7 番 29 号
電話番号：072-822-6936
販売元：大栄歯科産業株式会社
住所：〒550-0003
大阪府大阪市西区京町堀 1-10-17
電話番号：06-6441-3332