

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 (JMDN 70901000)

仕上用研磨材 ルージュピカール

【形状・構造及び原理等】
組成：研磨剤、モノカルボン酸

外観・成分：

外 観	成 分
薄緑色 固形状	・ 酸化アルミニウム ・ 珪砂 ・ モノカルボン酸

【使用目的又は効果】
(1) 使用目的、用途
レジン、ポリカーボネイト樹脂等の艶出し研磨（最終仕上）に用いる。

【使用方法等】
(1) 本品適量を先端工具（バフ、ブラシ、フェルトホイール）に付ける。

(2) 回転研削機械（ハンドピースグラインダー、バフプレーズ）にて任意の回転数で回転させた(1)の先端工具を被加工物表面に接触させる。

(3) 研磨作業の際は必ず使用するバフ、ブラシ、フェルトホイールや研削機械の操作手順に従うこと。

【使用上の注意】
(1) 研磨作業の際には粉塵が発生する。
粉塵による人体への影響を避けるため、防塵マスク、手袋等の適切な防塵装備の使用と集塵装置の設置を義務付けること。
また、眼の損傷を防ぐため、保護めがねを着用すること。

(2) 研磨後は加工物に本品の成分が付着している為、
バフ用クリーナー等できれいに洗浄して油分を落とすこと。

(3) 本品は記載の用途以外には使用しないこと。

(4) 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。

(5) 使用後は産業廃棄物処理法に従って処理すること。

【保管方法及び有効期間等】
(1) 貯蔵・保管方法
火気厳禁で直射日光を避けた室温40℃以下の場所で保管すること。
また、落下による破損防止の為、安定した場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
(1) 製造販売業者・製造業者
氏 名： 有限会社 秋山産業
住 所： 〒572-0865
大阪府寝屋川市小路北町7番29号
電話番号： 072-822-6936