

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (JMDN 70907000)

ピカット C

【形状・構造及び原理等】

組成：炭素、炭化珪素、モノカルボン酸
外観：固形状
色：薄緑色

【使用目的又は効果】

- 使用目的、用途
歯科用セラミック、歯科用ハイブリッドレジン等の艶出し
研磨（最終仕上）に用いる。

【使用方法等】

- 回転研削機械（ハンドピースグラインダー、バフレース）
に先端工具（バフ、ブラシ、フェルトホイール）を
取り付ける。
- 回転研削機械にて先端工具を低速回転させながら、本品適量を
先端工具外周に塗布する。
- 回転研削機械にて(2)の先端工具を任意の回転数で回転させた
状態で、対象技工物表面に接触させる。
- 研磨作業の際は必ず使用する回転研削機械や先端工具の操作
手順に従うこと。

【使用上の注意】

- 研磨作業の際には粉塵が発生する。
粉塵による人体への影響を避けるため、防塵マスク、手袋
等の適切な防塵装備の使用と、集塵装置の設置を義務付ける
こと。
また、眼の損傷を防ぐため、保護めがねを着用すること。
- 研磨後は加工物に本品の成分が付着している為、
バフ用クリーナー等できれいに洗浄して油分を落とすこと。
- 本品は記載の用途以外には使用しないこと。
- 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。
- 使用後は産業廃棄物処理法に従って処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 貯蔵・保管方法
火気厳禁で直射日光を避けた室温40℃以下の場所で保管すること。
また、落下による破損防止の為、安定した場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者・製造業者
氏 名： 有限会社 秋山産業
住 所： 〒572-0865
大阪府寝屋川市小路北町7番29号
電話番号： 072-822-6936