

## 医療用品(4) 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ (JMDNコード: 35531000)

## ExcelsiusGPS ガイド機能付きナビゲーション システム専用ドレープ

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

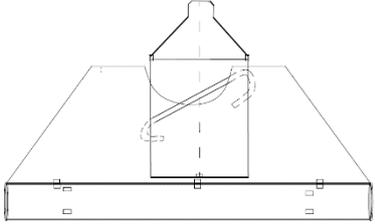
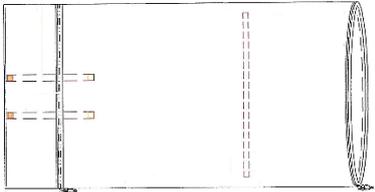
- ・ 再使用禁止
- ・ 再滅菌禁止

## 【形状・構造及び原理等】

本品は、手術室等の汚染から機器を隔離するための保護的なカバーである。  
本品は単回使用である。

原材料: ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアミド

なお、下記構成部品は単品にて製造販売する場合があります。

No	製品名	形状・構造例
1	Excelsius アームドレープ	
2	Excelsius モニタードレープ	

## 【使用目的又は効果】

本品は、手術室等の汚染から機器を隔離するために保護的なカバーとして用いる。

## 【使用方法等】

本品は以下に示す医療機器(本体)に使用される。

販売名: ExcelsiusGPS ガイド機能付きナビゲーション システム

## &lt;使用方法&gt;

- 1) ドレープの折り畳みを展開する。
- 2) 本体からアームにかけて、アームドレープで覆う。
- 3) モニターからフレキシブルアームまでをモニタードレープで覆う。

## 【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

有効期限: 販売単位箱及び個別包装に表示

例:  2025-01 使用期限: 2025年1月を示す。

## \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者 グローバスメディカル株式会社

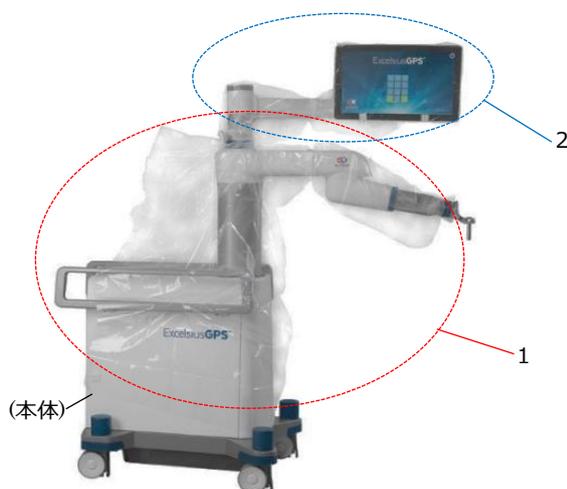
\*\* 電話番号: 03-6402-3311 (文献請求先: 品質保証部)

・製造業者 グローバスメディカル社

GLOBUS MEDICAL, INC.

製造業者所在国: アメリカ合衆国

外観写真例:



取扱説明書を必ずご参照下さい