

平成31年3月3日（第1版）

医療機器届出番号28B2X10027KA0001

機器・器具（12）理学診療用器具 一般医療機器 一般名称：弾性ストッキング JMDN コード：31724000

エデマ ソックス

【警 告】

1. 適用対象（次の症状の方は特に注意すること）

- ① 深部静脈血栓症の方で、本品を装着すると肺血栓塞栓症を起こすおそれのある方。
〔肺血栓塞栓症を発症するおそれがあるため〕
- ② 動脈血行障害やうっ血性心不全のある方。
〔圧迫により症状が悪化するおそれがあるため〕
- ③ 装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある方。
〔圧迫により症状が悪化するおそれがあるため〕
- ④ 装着部位に知覚障害がある方。
〔痛み等の異常を認識できないおそれがあるため〕
- ⑤ 過敏症のある方。
〔接触皮膚炎を起こすおそれがあるため〕
- ⑥ 糖尿病方。
〔無症状の知覚障害や血行障害を併発している場合、痛み等の異常を認識できず、また症状を悪化させるおそれがあるため〕
- ⑦ 装着部位に極度の変形を有する方。
〔適切な圧迫を得られないおそれがあるため〕

2. 使用方法

医師が認める場合を除き就寝時は着用しないこと。

〔就寝中に静脈圧が低下することから、相対的に圧迫圧が高まるおそれがあるため〕

【禁忌・禁止】

1. 重度の血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の方。
〔圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため〕
2. 化膿性静脈炎の方。
〔菌血症や肺血症を発生、憎悪させるおそれがあるため〕
3. サイズが合わない方。
〔各部位に過剰、過少な着圧がかかるため、血行が悪くなったり、本品の効果が発揮されないおそれがあるため〕

【形状・構造及び原理等】

1. 形状：靴下
2. 構造・原理：足首からふくらはぎにかけて漸減的に圧迫し、静脈血、リンパ液の流れを促進する。

圧迫圧

足首部圧迫圧 25～35 h p a

ふくらはぎ圧迫圧 15～25 h p a

・圧迫圧は各部位における参考値です、装着者の体系により圧迫圧は異なります。

3. 組成

綿・ナイロン・その他

【使用目的】

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。抹消から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

【効能又は効果】

- ・静脈血の停滞の予防軽減 ・血行促進 ・浮腫みの予防軽減
- ・リンパの流れを改善

【使用方法】

1. 両手で商品をたぐりよせ、つま先を入れる。
2. 足首まで引き上げ、かかとの位置を合わせる。
3. 両手の親指を内側に入れ、少しずつ均等に引き上げる。
4. 膝下まで引き上げる。

【使用上の注意】

1. 本来の用途以外は使用しないこと。
2. サイズの合わないものを使用しないこと。〔血行が悪くなるおそれがあります〕
3. 2枚以上重ねて使用しないこと。〔血行が悪くなるおそれがあります〕
4. 使用中、使用後に気分が悪くなったり、かゆみ、発疹、痛み、しびれなどの異常を感じたときは直ちにご使用をお止め下さい。
5. 長時間のご使用はお控え下さい。

【保管方法】

1. ねじれた状態での使用や保管はしないで下さい。

【包 装】

包装単位：一足入り/箱

【製造販売業者及び製造業者】

株式会社 アイナリー

兵庫県姫路市御国野町御着420番地1

