


機器・器具（12）理学診療用器具 一般医療機器 一般名称：温熱パック JMDNコード：37240010

セラミックス イオンディスク

【形状・構造及び原理等】

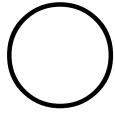

直径：約26mm 厚さ：約3mm 円板状の陶器

本品を加熱装置等で加熱することにより本品が温まる、患部に温熱を供給する。

【使用目的又は効果】

本品を加熱装置等で加熱したものを専用の装着パッドに挿入し、付属品腰ベルトに装着し、それを腰部に当て消炎鎮痛処置（温熱治療）を行う。本品は、再生使用可能である。

本品を腰部に装着することにより、腰部及びその周辺に次の様な効果効能を期待できる

- ・血行を良くする。 ・筋肉のコリをほぐす。
- ・一般的腰痛、腰周辺の筋肉痛などの痛みの緩和
- ・新陳代謝の促進 ・冷えの緩和

【使用方法】

本品を加熱装置等で加熱した物を専用の装着パッドに挿入し付属品腰ベルトに装着し使用する。

【使用上の注意】

1. お肌（外傷、湿疹等）及び体調に不具合がある場合は、使用しないこと。
2. 使用中、お肌（かゆみ、湿疹等）及び体に変調を感じた場合は直ちに使用を中止すること。
3. 15歳未満の方は使用しないこと。
4. 1日8時間を目安に使用すること。
5. 本来の用途以外には使用しないこと。
6. 本品は割れ物なので、使用中・保管の際には落としたりぶつけたりしないように注意すること。
7. 乳児・小児やペットの手の届かないところに保管すること。
8. 汚れたときは、濡らした布等で拭き取るか、汚れがひどい場合は中性洗剤で洗うこと。
9. お肌に直接ではなく、下着などの上から着用すること。
10. 加熱後のセラミック イオンディスクは火傷に注意し使用すること。

【保管方法】

1. 幼少児の手の届かないところに保管すること。万一誤飲した場合は、医師の指導を仰ぐこと。
2. 直射日光および高温多湿を避け、湿気の少ない場所で保管すること。

【包装】

包装単位：装着用専用パッドに本品12枚セット済み

【製造販売業者及び製造業者】

株式会社 アイナリー

兵庫県姫路市御国野町御着420番地1

【発売元】

株式会社 カブール

大阪府大阪市天王寺区生玉町2-24

TEL：06-6776-9102