

アサヒディスポタッチB


再使用禁止

【禁忌・禁止】

*再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

*鍼形状構造

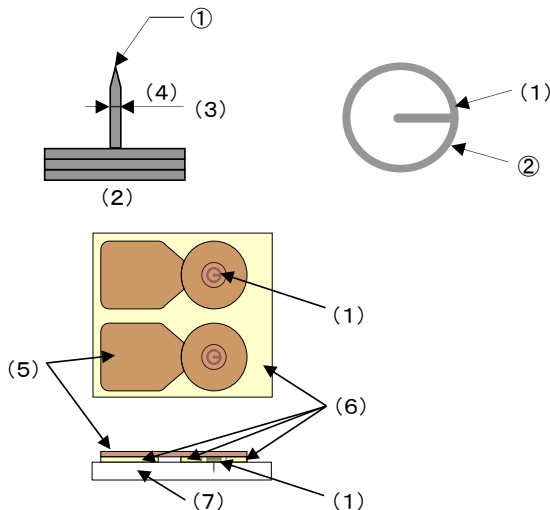

(1)鍼(鍼体) (2)リング径 (3)鍼体長 (4)鍼体径
(5)テープ (6)剥離紙 (7)マット

鍼体材質：ステンレス

*寸法等は、包装表示に記載。

鍼体の①(鍼尖)は、鋭利に研磨されています。

鍼体の②は、円状に加工されています。

鍼(テープに貼り付けてある)は、マットに刺しことにより鍼先のつぶれ等を防いでいます。

鍼治療使用時は、包装からマットを取り出しテープの四角い部分を持って剥離紙から離し、体にテープ(鍼付)貼ったあと四角い部分を引っ張るとテープの丸上から切り離されることにより、鍼体に触れることなく挿入可能です。

*【使用目的又は効果】

鍼治療に使用すること。

*【使用方法等】

本品は滅菌済み製品(管理医療機器)です。

1回限りの使用のみで再使用できません。

- (1) 刺入部位の皮膚を消毒します。
- (2) 包装(袋)を開封し、マットを取り出します。
- (3) テープの四角い部分を持って鍼の付いたテープを一緒に剥離紙から剥がします。
- (4) 鍼(テープ付鍼)刺入後、四角い部分を引っ張るとテープの丸上から切り離します。

(5) 使用後は破棄すること。

*〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- ・使用前に鍼の状態を点検して下さい。湾曲や、損傷などがある場合は使用してはならない。
- ・灸頭鍼には適した鍼ではございません。灸頭には使用しないで下さい。

【使用上の注意】

*使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

原則として、次の患者には適用しないこと。

妊娠、緊急事態もしくは手術を必要とする場合、悪性腫瘍、出血性患者、金属アレルギーのある患者
ただし、特に必要な場合においては慎重に適用すること。

*重要な基本的注意

- ・包装に破損等がある場合は使用しないで下さい。
- ・鍼の材料は医療用として、特別に合金された製線で、極めて細く折れやすいので、通常に使用する際にも注意して下さい。
- ・*鍼先及び鍼体に直接手で触れないで下さい。
- ・鍼の特性に合わない使用はしてはならない。
- ・貼付する時間は24時間以内でお願い致します。
- ・入浴時は鍼をはずし、入浴後は新しい鍼を貼付して下さい。
- ・*開封後は直ちに使用して下さい。
- ・鍼体に変色した製品は使用しないで下さい。
- ・**一度開封しますと無菌保証が出来なくなります。開封後使用しなかった場合、鍼は使用せず廃棄して下さい。
- ・**使用期限の過ぎた鍼は使用しないで下さい。
- ・**鍼を廃棄する場合、自治体の廃棄方法に従って感染防止に留意し廃棄して下さい。
- ・*通電に適した鍼ではありません。
- ・*通電等で起こった折鍼事故などについての責任は一切負いません。
- ・*貼付時間は24時間以内となるようご指導下さい。

*【保管方法及び有効期間等】

水濡れ、直射日光及び高温多湿をさせて子供の手の届かない所に保管して下さい。

使用期限は、箱に記載してあります。(自己認証により設定)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社アサヒ医療器

住 所：埼玉県川口市東本郷1-7-21

電 話 番 号：048-285-2311

製 造 業 者：株式会社アサヒ医療器