

ワンタッチ針

再使用禁止


【警告】

- ①本品を使用後は保護キャップをした上で、感染防止に配慮して医師に指定された場所に処分すること。
- ②感染予防のため、採血部位の消毒を行うこと。

【禁忌・禁止】

- ①再使用禁止。
- ②外観を確認し、保護キャップが外れていたり、破損している場合は使用しないこと。
- ③小児の手の届かないところへ保管すること。
- ④本品は使用期限内のものを使用すること。

【形状・構造及び原理等】

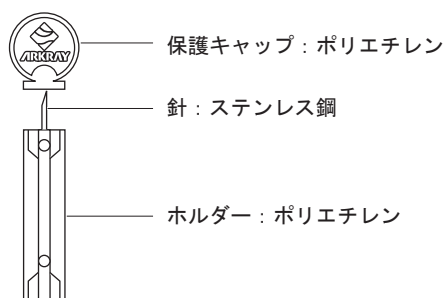

【使用目的】

本品は血糖値測定、血液型判定等のための微量採血を目的とする医療機器である。放射線照射滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。

* 【操作方法又は使用方法等】

- ①本品を穿刺器具「ワンタッチウルトラソフト(届出番号：13B1X00204ML0001)」に奥までしっかりと装着する。
- ②保護キャップをねじってホルダーから切り離してから採血する。
- ③本品を使用した後は、針に保護キャップをつけて廃棄する。

** 【使用上の注意】

* 重要な基本的注意

- ①指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗うこと。
- ②果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となる恐れがある。〔アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告がある。〕
- ③以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがある。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
- ④併用する「ワンタッチウルトラソフト(届出番号：13B1X00204ML0001)」(別売)の添付文書も併せて参照すること。
- ⑤保護キャップを外したらすぐに使用すること。
- ⑥耳朶等、組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないこと。〔組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがある。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討すること。〕

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法：水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管すること。

使用期限：製品の包装に記載〔自己認証(当社データ)による〕

【包装】

25本入、30本入、50本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 **株式会社 アークレイ ファクトリー**
〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子1480

製造元 **株式会社 アークレイ ファクトリー**

発売元 **アークレイ株式会社**
〒601-8045 京都市南区東九条西明田町57

販売元 **ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社**
〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号

<お問い合わせ先>

ワンタッチ コールセンター

TEL 0120-113-903

(24時間365日対応 携帯電話・PHSからでもかけられます)