

ナチュラルレット

再使用禁止

【警告】

●使用方法


- ①感染の危険性があるため、採血部位を必ず消毒してください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときは、医師の指導を受けてください。
- ②採血を行ったあとの穿刺針には血液が付着しています。病原微生物の感染を防ぐために、使用後は医師の指示にしたがって他人に触れないように捨ててください。

【禁忌・禁止】

- ①再使用禁止。ナチュラルレットは使い捨てです。一度使用したナチュラルレットは再使用せずに、必ず新しいナチュラルレットをご使用ください。
- ②使用時にすでに保護キャップがはずれている場合は使用しないでください。
- ③小児の手の届かないところに保管してください。
- ④使用期限を過ぎたナチュラルレットは使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

針：ステンレス鋼

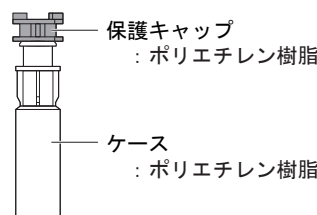

【使用目的】

本品は血糖値測定、血液型測定等のための微量採血を目的とする医療機器です。放射線照射滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【操作方法又は使用方法等】

- ①ナチュラルレットを穿刺器具に挿入してください。
穿刺器具は専用の穿刺器具（販売名：ナチュラルレット デバイス）をご使用ください。
 - ②保護キャップをねじ切ってケースからはずし、採血してください。
 - ③ディスプレイ製品であるので、1回限りの使用であって再使用できません。
- ※詳細な使用方法は穿刺器具の取扱説明書をご参照ください。

**【使用上の注意】

*・重要な基本的注意

- ①指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
- ②果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となる恐れがあります。〔アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。〕
- ③以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
- ④本品はナチュラルレット デバイス専用ですので、それ以外の穿刺器具では使用しないでください。
- ⑤耳朶等、組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。〔組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。〕

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿をさけて保管してください。
2. 使用期間
外箱に記載しています。〔自己認証(当社データ)による〕

【包装】

25本×8箱、もしくは30本×8箱で梱包しています。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 **株式会社 アークレイ ファクトリー**
〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子1480

<問合わせ先>
アークレイ コールセンター
TEL 0120-81-1955
(平日10:00~17:00 但し12:00~13:00を除く)

製 造 元 **株式会社 アークレイ ファクトリー**

販 売 元 **アークレイ株式会社**
〒601-8045 京都市南区東九条西明田町57