
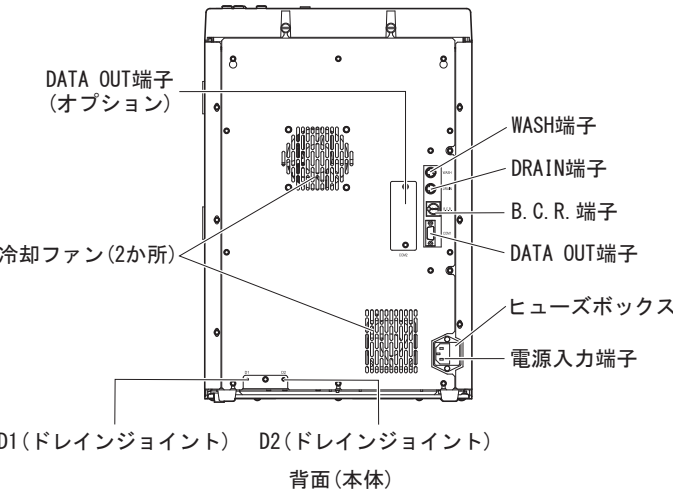
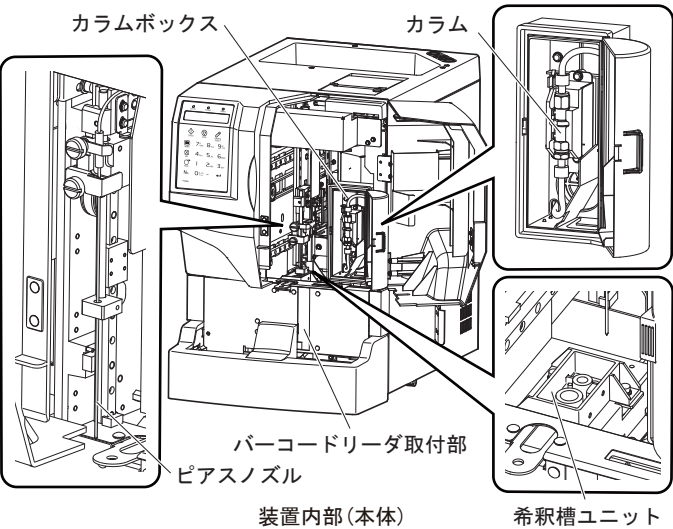


器 17 血液検査用器具
特定保守管理医療機器 一般医療機器 グリコヘモグロビン分析装置 35968000

アダマス A1c ライト HA-8380V

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

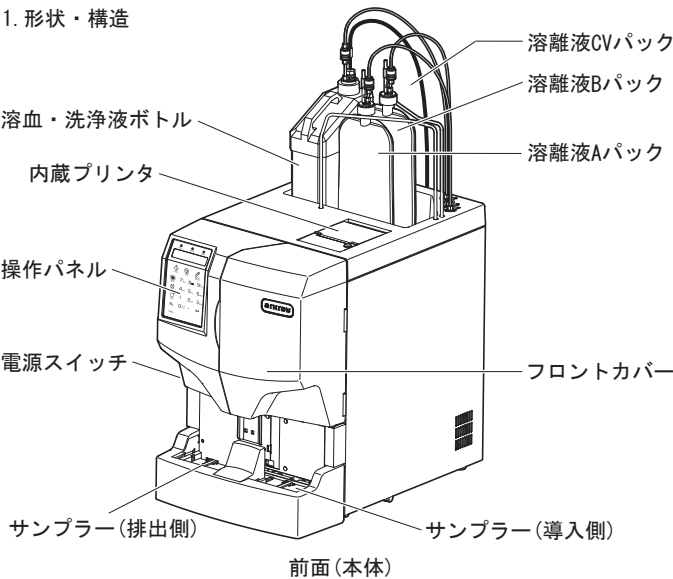

外形寸法	330(幅)×515(奥行)×485(高さ) mm (突起部、溶離液パック、溶血・洗浄液ボトルを含まず)
重量	約35 kg
電源電圧	AC 100 - 240 V±10%、50/60 Hz
電源入力	300 VA
測定環境	温度:10~30℃、湿度:20~80% R.H.(結露しないこと)

※本製品は、IEC 61326-2-6:2012に適合しています。


2. 原理

血液中のHbA1cを、逆相分配陽イオン交換クロマトグラフィーにより測定します。溶血・洗浄液で希釈された検体がカラムに送り込まれ、高速液体クロマトグラフィーにより数種のヘモグロビン成分に分画溶出されます。溶出された各成分は二波長比色計で測定され、そのデータをマイクロコンピュータで処理し、各成分のピーク同定と含有率を測定します。

【使用目的】

HPLCを用いて、ヒト血液中に存在するグリコヘモグロビン(HbA1c)濃度を測定する装置です。

【使用方法等】

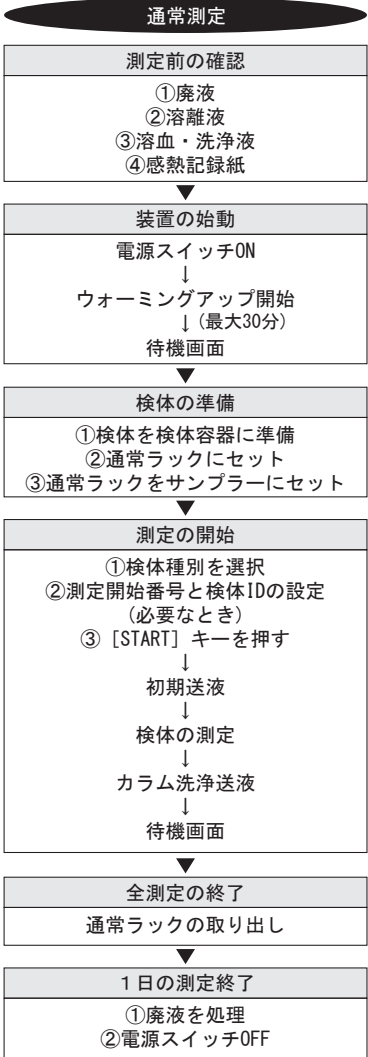

取扱説明書を必ずご参照ください

【使用上の注意】

使用方法

①検体の取り扱いについて

- 全血検体の抗凝固剤には、「ヘパリン」「EDTA-2Na」「EDTA-2K」「EDTA-3K」「NaF」のいずれかを使用してください。
- 全血検体を保存するときは、全血のまま2～8℃で冷蔵保存してください。
- 溶血希釈検体の測定可能なヘモグロビン濃度は、45～140 mg/dL（標準 94 mg/dL）です。この濃度範囲を超えときは、エラーが発生したり再現性が悪くなることがあります。適切な希釈率に変更し、濃度を調整してから測定してください。

②カラムの取り扱いについて

- カラムは3～25℃で保存し、乾燥させたり衝撃を与えたりしないでください。
- カラムには方向性があります。装置に取りつけるときは、流路のIN側とOUT側に注意してください。

③溶離液の取り扱いについて

- 冷蔵庫などで保存している場合は、装置と同じ環境に1時間以上なじませてから装置に取りつけてください。

④その他

- 測定結果には装置の施設間差や環境変化による測定誤差が発生することがあります。これを解消するために定期的に装置の校正をおこなってください。

【保管方法及び有効期間等】

保管環境：温度：1～35℃、湿度：20～80% R.H.（結露しないこと）

耐用期間：使用開始（据付）後5年間（自己認証による）

- * 条件：取扱説明書や電子添文に示す保守点検を定期的の実施し、点検結果により修理またはオーバーホールが必要であれば実施してください。電子添文の保守・点検に係わる事項や取扱説明書の該当個所に記載の保守部品を定期的に交換してください。

【保守・点検に係わる事項】

使用者による保守点検事項

①コントロール測定

定期的にHbA1cコントロールを測定することで、装置の状態や測定精度を管理します。コントロールには市販または弊社指定のコントロールを使用してください。

②毎日のお手入れ

お手入れの際は、病原微生物の感染を防ぐため、必ず保護手袋をつけて作業をしてください。廃液、使用済みの保護手袋などは一般のゴミと区別し、環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」にしたがって処理してください。

●廃液の処理

装置の背面にある「D1:光学系」、「D2:廃液用」からは、装置からの廃液が排出されます。毎日、測定を始める前にボトルの廃液を処理してください。

③消耗品の交換

●溶離液の交換

溶離液は必ずパックごと交換してください。つぎ足して使用すると、正しい測定結果が得られません。

●溶血・洗浄液の交換

溶血・洗浄液は必ずボトルごと交換してください。つぎ足して使用すると、正しい測定結果が得られません。

●感熱記録紙の交換

●カラムの交換

2500測定、または前回のカラム交換から1年が過ぎたカラムは、正確な測定結果が得られない可能性がありますので使用しないでください。

●ピアスノズルの交換

ピアスノズルは20000測定ごとに交換してください。また、ピアスノズルが詰まったときや破損したときも交換が必要です。

●溶離液と溶血・洗浄液のノズルのメッシュフィルタ交換

溶離液と溶血・洗浄液のノズルのメッシュフィルタは2000測定ごとに交換してください。メッシュフィルタにゴミが詰まると、配管系のトラブルが発生します。

④各部の洗浄と清掃

●流路の洗浄

流路は1週間に1回、洗浄してください。流路が汚れていると、正しい測定結果が得られません。

●ピアスノズルの清掃

ピアスノズルは1週間に1回、清掃してください。ピアスノズルが汚れていると、正しい測定結果が得られません。

●希釈槽ユニットの清掃

希釈槽ユニット（希釈槽と洗浄槽）は、1か月に1回清掃してください。希釈槽ユニットが汚れていると、正しい測定結果が得られません。

●光学系セルの洗浄

光学系セルの洗浄は1年ごと、または12000測定のいずれか早い時期におこなってください。光学系セルが汚れていると、正しい測定結果が得られません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元

株式会社アークレイ ファクトリー

＜問い合わせ先＞

アークレイ お客様相談室

滋賀県甲賀市甲南町柑子1480 〒520-3306

TEL 0120-103-400＜通話料無料＞

（平日 8:30～18:00、土曜日 8:30～12:00）

製造元

アークレイ株式会社

販売元

アークレイ株式会社