

## うで用マルチランセット

### 【警告】

#### ●適用対象(測定者)

①採血を行ったあとの穿刺針には血液が付着しています。病原微生物の感染を防ぐために、使用後はかかりつけの医師の指示にしたがって他人に触れないように捨ててください。

②前腕から採血をするときは、血管の見える部分からの採血をおやめください。

#### ●使用方法

①感染の危険性があるため、採血部位を必ず消毒してください。また、採血後はばんそうこうなどで必ず止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときは、医師の指導を受けてください。

②うで用マルチランセットをご使用いただくことで、前腕からの採血により測定を行うことが可能ですが、以下のような低血糖など(発汗/冷や汗、浮揚感、震えなどの症状)の可能性があるときは、指先から採血を行ってください。

- ・低血糖の可能性があるとき
- ・低血糖かどうか調べるとき
- ・血糖低下状態だと思われるとき
- ・運動の後など、血糖値が急激に変化する可能性があるとき
- ・かぜをひいたときなど、体調のすぐれないとき

※急激な血糖の変動が認められるとき、前腕の血糖変動は、指先よりも遅れるとの報告があります。

### 【禁忌・禁止】

①穿刺針は1回限りの使い捨てです。一度使用した穿刺針は再使用せずに必ず新しい穿刺針をご使用ください。

②個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと。


[付着した血液を介して病原微生物に感染する恐れがあるため]

③血糖測定をするときは、血糖測定機の取扱説明書を必ずお読みください。

④穿刺針は小児の手の届かないところに保管してください。

⑤うで用マルチランセットを採血以外の目的で使用しないでください。

### 【形状・構造等】

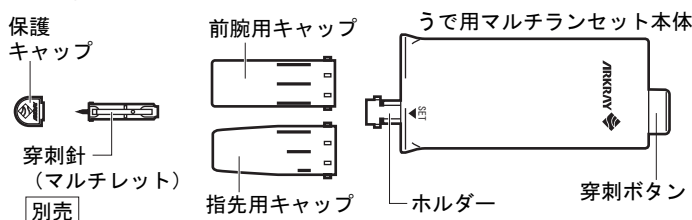


### 【性能・使用目的】

#### 使用目的

前腕、および指先から血糖値等を測定するために微量の血液を採取する器具です。

### 【操作方法又は使用方法等(用法・用量含む)】

#### 前腕から採血する場合の使用方法

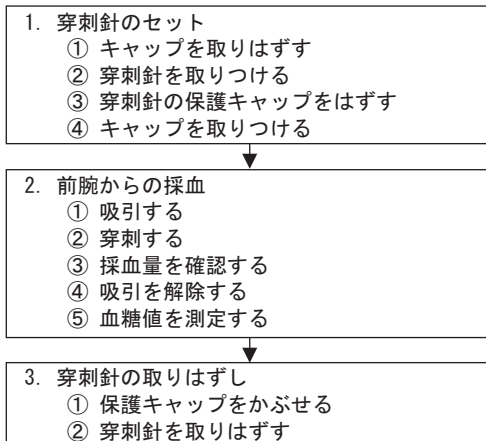

※詳細な使用方法、および指先から採血する場合の使用方法は取扱説明書をご参照ください。

取扱説明書を必ずご参照ください

### 【使用上の注意】

#### \*\* ・重要な基本的注意

①指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。

②果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]

③以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。

- ・脱水状態
- ・ショック状態
- ・末梢循環障害

④前腕用キャップ、指先用キャップをはずすときは、針先が指などに触れないように注意して操作してください。

⑤前腕からの採血は、体質、皮膚の特性などにより困難なことがあります。

⑥前腕から採血する場合、体質、採血部位などにより内出血することがあります。

⑦前腕から採血する場合、体質によっては、採血部位の傷が治るのに数日間かかることがあります。

⑧使用後は取扱説明書を参照いただき、お手入れをしてください。

⑨穿刺針は専用穿刺針「マルチレット」(別売)をご使用ください。

⑩うで用マルチランセットは、消毒液への浸漬や噴霧または高温殺菌(オートクレーブや煮沸など)をしないでください。故障の原因となります。

⑪使用前に針をつけて動作確認を行ってください。動作確認で針がもどらずに出たままの状態になる場合には、そのうで用マルチランセットは使用しないでください。

#### <動作確認>

1. 指に当てずに穿刺ボタンを押します。

2. 前腕用キャップ、指先用キャップより針が出たままの状態でないことを確認します。

⑫使用後に前腕用キャップ、指先用キャップより針が出ていないことを確認してください。針が出たままの状態の場合には使用しないでください。

\* ⑬組織が薄い部位への穿刺を行うと、組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがありますので、添付文書上にある穿刺部位を守ってください。

### 【貯蔵・保管方法及び有効使用期間等】

有効使用期間：使用開始後3年[自己認証(当社データ)による]

条件：取扱説明書や添付文書に示す使用上の注意をよくお読みになり、正しくご使用ください。

### 【包装】

1本単位で梱包しています。

#### \*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 **株式会社 アークレイ ファクトリー**  
〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子1480

<問合わせ先>  
アークレイ コールセンター  
TEL 0120-81-1955  
6:00~22:00 (年中無休)

製造元 **株式会社 アークレイ ファクトリー**

販売元 **アークレイ株式会社**

〒601-8045 京都市南区東九条西明田町57