

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

NARロールガーゼ

禁忌・禁止

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ガーゼパック 約L155 x W110 x D16mm



ロールガーゼ：
サイズ： 圧縮時：L79 x W53 x D16
使用時：L3800 x W110
重さ：40 g



素材： プレミアムコットン

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

【使用方法】

本品は単回使用である。

1. パッケージを開ける。
2. ガーゼパックを取り出す。
3. ガーゼパックを破り、ガーゼを取り出す。
4. 使用目的に応じ適宜使用する。



*【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
5. 本品は単回使用である。

【包装】1個単位

【ロット番号】 パッケージ又は被包に表示

【保管方法及び有効期間等】 常温・常湿

【主要文献及び請求先】

請求先： アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製造業者： ノースアメリカンレスキュー社
North American Rescue, LLC.
(アメリカ・サウスカロライナ州)