

医04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 3486400

SAMチェストシールスタンダード

禁忌・禁止

再使用禁止

【組成・形状・構造等】 【原材料又は構成部品】

パッケージ：パウチパック 約15.9cm x 25.4cm

内容物：

1. チェストシール 2枚
2. 不織布 1枚

チェストシール：表面（ポリウレタン）
裏面（ハイドロジェル）
ライナー（ポリエスター）

チェストシール：約23.4cm x 19.3cm



不織布

約12.7cm x 22.9cm

6. 確実に閉塞するよう、チェストシールを上から
しっかり押す。

7. チェストシールを剥がすときは医師の指導、
監視下で行う。

【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は
直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が
使用すること。
5. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは
使用しないこと。

【包装】1個単位

【使用目的・効能又は効果】

- ・ 身体の一部に用いる、接着剤を付した布製または
プラスチック製の各種形状の絆創膏材をいう。
傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の一部
部位の支持等に用いる。
- ・ 本品は軍・軍関係機関及び救急医療において、
深部銃創・切傷に対応し、創傷の救急閉塞に用いる。

【使用期限】 パッケージ又は被包に表示

【貯蔵・保管】 常温・常湿

【主要文献及び請求先】

請求先： アコードインターナショナル株式会社

【使用方法】

1. パッケージを開ける。
2. チェストシール、他を取り出す。
3. パッケージに同封の不織布で傷口の汚れや異物を
完全に取り去る。
4. チェストシールを、タブを持ち、透明なライナーから
剥がす。
5. チェストシールを、接着面を下にして、傷口を
中心にして貼る。

【製造販売業者の名称及び住所等】

製造販売元： アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752
製造元： ザ・シーバーク・カンパニー
(アメリカ・オレゴン州)