

医04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 3486400

再使用禁止

SAMチェストシールバルブ付き

禁忌・禁止

再使用禁止

【組成・形状・構造等】 【原材料又は構成部品】

パッケージ：パウチパック 約16cm x 25.4cm

内容物：

1. チェストシール 1枚
2. 不織布 1枚

チェストシール：表面（ポリウレタン）
バルブ（ポリプロピレン）
裏面（ハイドロジェル）
ライナー（ポリエステル）

チェストシール：約23.4cm x 19.3cm



不織布

約12.7cm x 22.9cm

【使用目的・効能又は効果】

- ・ 身体の部位に用いる、接着剤を付した布製またはプラスチック製の各種形状の絆創膏材をいう。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
- ・ 本品は軍・軍関係機関及び救急医療において、深部銃創・切傷に対応し、創傷の救急閉塞に用いる。

【使用方法】

1. パッケージを開ける。
2. チェストシール、他を取り出す。
3. パッケージに同封の不織布で傷口の汚れや異物を完全に取り去る。
4. チェストシールを、タブを持ち、透明なライナーから剥がす。
5. チェストシールを、接着面を下にして、傷口を中心にして貼る。

6. 確実に閉塞するよう、チェストシールを上からしっかり押す。
7. 必要に応じて、一方向バルブのキャップを開閉する。
8. チェストシールを剥がすときは医師の指導、監視下で行う。

【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
5. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。

【包装】1個単位

【使用期限】 パッケージ又は被包に表示

【貯蔵・保管】 常温・常湿

【主要文献及び請求先】

請求先：アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者の名称及び住所等】

製造販売元：アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752
製造元：ザ・シーバーク・カンパニー
(アメリカ・オレゴン州)