

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

再使用禁止

キトサム100

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

①形状、構造

	キトサム 100 04 止血包帯	キトサム 100 44 止血包帯	キトサム 100 06 止血包帯
製品番号	CTS100-04	CTS100-44	CTS100-06
サイズ	10cmx10cm	7.6cmx1.22m	7.6cmx1.83m
重 さ	8g	20g	24g
原材料	キ ト サ ム		
形 状			

②原理

出血部位を覆うと、プラス電荷されたキトサムがマイナス電化された血小板・赤血球と結合し、さらに血液を吸収し、血餅を形成する。
形成された血餅が出血部位を塞ぎ出血を止める。

【使用目的又は効果】

創傷の出血を止血するために使用する。

【使用方法】

- パッケージの四方に設けた切り込みより開封する。
- キトサムで創傷を覆う。
- 止血するまで 3 分間しっかり圧迫する。包帯を巻いて創傷への圧迫を維持する。
- 残存したキトサムを取り除く場合は、滅菌生理食塩水か水ですすぐ。

【使用上の注意】

- ・パッケージが開封・破損している場合は使用しないこと。
- ・パッケージに使用期限の表示がないものや、使用期限後のものは使用しないこと。
- ・開封後は速やかに使用し使い切ること。
- ・眼には使用しないこと。
- ・使用後はできるだけ早く医師の処置を受けること。
- ・医療処置を行う前に、凝固した血液等を完全に取り除くこと。

【保管方法及び使用期間等】

- ・室温にて保管
- ・使用期限：パッケージに表示

【包装】 1個単位

【文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製 造 販 売 業 者：アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736

製 造 業 者：サム メディカル プロダクツ社
SAM MEDICAL PRODUCTS
(アメリカ・オレゴン州)