

医療用品 04 整形用品
一般医療機器機器 救急絆創膏 34864000

NARチェストシール ベント付き

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

・パッケージ：パウチパック 約11.8cm x 19cm x 0.2cm

内容物：

[原材料・寸法]

1. チェストシール 1枚(滅菌)約15 x 15cm(除：レッドチップ)

素材：アクリル系粘着テープ/ポリマー



2. メッシュ不織布 1枚(滅菌)約10cmx10cm 2重折



【使用目的又は効果】

- ・本品は軍・軍関係機関及び救急医療において、深部銃創・切傷に対応し、創傷の救急閉塞に用いる。

【使用方法等】

1. パッケージを開け、チェストシールを取り出す。
2. 傷口の汚れ/血液等を同梱の不織布で取り去る。
3. レッドチップ部分を持ち、透明シールを剥がす。
4. 傷口の中心にチェストシールを当てる。
5. しっかりと傷口にチェストシールを押し付ける。
6. チェストシールを剥がすときは医師の指導、監視下でレッドチップを持ち上げ、ゆっくり剥がす。

【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
5. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

- ・常温の室温にて保管
- ・使用期限：パッケージに表示

【包装】1個単位

【主要文献及び請求先】

請求先：アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752
製造元：ノースアメリカンレスキュー社
North American Rescue, LLC
(アメリカ・サウスカロライナ州)