


医05 副木 35357000
一般医療機器 単回使用パッド入り副木

NAR頸部固定カラー

再使用禁止

禁忌・禁止
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

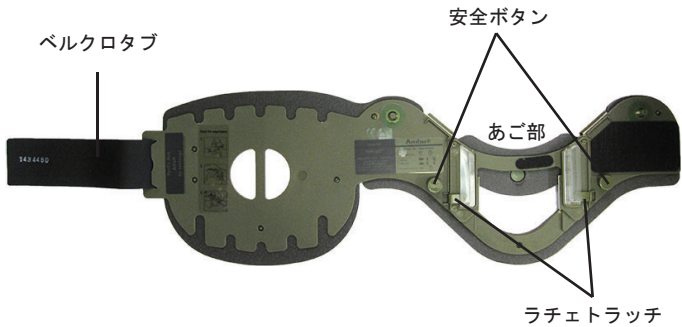


【原材料・寸法】

材 質：ポリプロピレン・ウレタンフォーム
サイズ：成人用：52 x 17 x 1.9 cm
重 量：成人用：147 g


【使用目的又は効果】

救急現場において脊椎損傷が疑われる患者の頸部を素早く固定し、搬送時の損傷拡大を防止する。


【使用方法等】

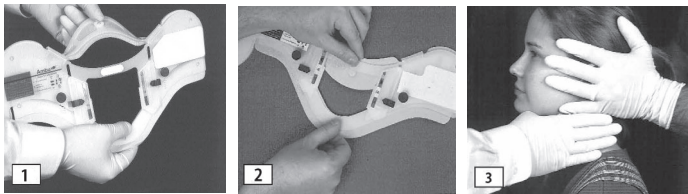


図の様にカラー部、あご部をつかみ、ひろげる。
あご部分をカラー後部からカラー前面に引っ繰り返す。
傷病者の下顎先端までの高さを測定する。指を首の付け根に置く。

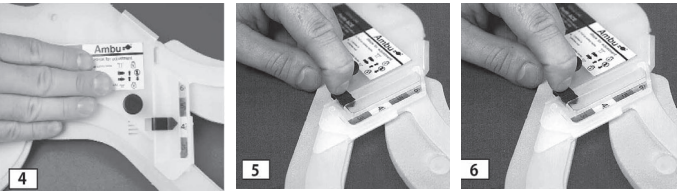

カラーの高さを決める。
カラーサイズラインに指を当て、3.で測定した高さがプラスチック下部のどこに該当するかをみる。
両側の安全ボタンを上を持ち上げ、ロックをはずす。
両側のラチェトラッチを引き出す。

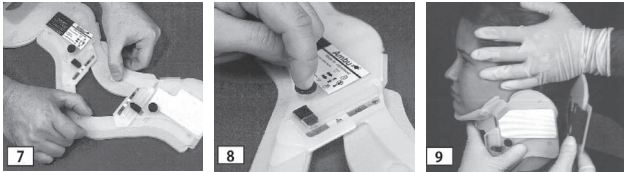

カラーの高さを調整する。
4.で決めた高さに達するまで、カラーを伸ばす。
両側のラチェトラッチを押し、セットする。
両側の安全ボタンを下に押し、安全ロックをかける。
カラー前面を傷病者の胸部に沿ってスライドし、位置付けする。傷病者の下顎をあご部分の中間点にのせる。

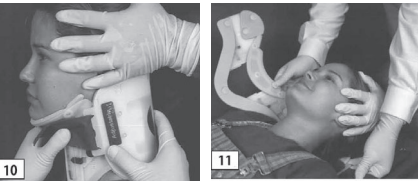

カラーの前面を支え、カラー後部を傷病者の頭頸部に廻す。カラー前面にベルクロタブがあることを確認する。
傷病者が横になっている場合はカラー後部を直接、傷病者の頸部後にスライドさせて、装着を終了する。

【使用上の注意】

- 1. 本製品の使用は医師または医療専門家による指示を受けた救急医療従事者のみが使用すること。
- 2. 使用前、本品に外観上異常がないことを確認する。
- 3. サイズの合わないものは使用しないこと。
- 4. 本品は単回使用であり、使用後は適切に廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【包装】 1個単位

【文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736
製造業者：ノースアメリカンレスキュー社
North American Rescue, LLC.
(アメリカ・サウスカロライナ州)