### 医療用品 04 整形用品

一般医療機器機器 救急絆創膏 34864000

# NARチェストシールベント付き 2枚組

### 再使用禁止

### 禁忌・禁止

再使用禁止

# 【形状・構造及び原理等】

・パッケージ: パウチパック 約19cm x 23cm

### 内容物:

### [原材料・寸法]

1. チェストシール 1枚(滅菌)約15 x 15cm(除:レッドチップ) 素材:アクリル系粘着テープ/ポリマー

# Lynkity Ty

### 2. メッシュ不織布 2枚 (滅菌) 約10cmx10cm 2重折



### 【使用目的・効能又は効果】

・本品は損傷の応急処置において、胸部の銃創・ 切傷など、創傷の緊急閉塞に用いる。

### 【操作方法又は使用方法等】

- 1. パッケージを開け、チェストシールを取り出す。
- 2. 傷口の汚れ/血液等を同梱の不織布で取り去る。
- 3. レッドチップ部分を持ち、透明シールを剥がす。
- 4. 傷口の中心にチェストシールを当てる。
- 5. しっかりと傷口にチェストシールを押し付ける。
- 6. チェストシールを剥がすときは医師の指導、監視下でレッドチップを持ち上げ、ゆっくり剥がす。

### 【使用上の注意】

- 1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
- 2. 開封後は早めに使用すること。
- 3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は 直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
- 4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
- 5. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。

# 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・常温の室温にて保管
- ・使用期限:パッケージに表示

# 【包装】1個単位

## 【主要文献及び請求先】

請求先: アコードインターナショナル株式会社

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: アコードインターナショナル株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4

TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製造業者: ノースアメリカンレスキュー社

North American Rescue, LLC (アメリカ・サウスカロライナ州)