

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器機器 医療ガーゼ 13700000

NAR コンプレスガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】  
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッケージ：パウチパック 7.6cm x 5.1cm x 3.8cm



ロールガーゼ：  
サイズ： 巾約11.4cm x 長さ375cm  
(6枚重ね/圧縮)  
重さ：34 g



【原材料】  
綿

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

【使用方法等】

本品は単回使用である。

1. パッケージを開ける。
2. ガーゼ袋を取り出す。
3. ガーゼ袋を破り、ガーゼを取り出す。
4. 使用目的に応じ適宜使用する。

【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
5. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。
6. 本品は単回使用である。

【保管方法及び有効期間】

- ・常温の室温にて保管
- ・有効期間:使用期限は包装に表示

【包装】1個単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社  
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F  
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736  
製造業者：ノースアメリカンレスキュー社  
North American Rescue, LLC.  
(アメリカ・サウスカロライナ州)